

MANUAL DE USUARIO - GENERAL

Este manual de usuario va a ser aplicable a todos los productos y series de INSAUSTI:

Serie SQS €€ → Carros estáticos en tamaño SQ. Todos los carros de esta serie se consideran productos sanitario clase I.

Serie SQM €€ → Carros de alta movilidad en tamaño SQ. Todos los carros de esta serie se consideran producto sanitario clase I.

Serie 300 €€ → Carros estáticos en tamaño ISO simple y doble. Todos los carros de esta serie se consideran producto sanitario clase I.

Serie 100 €€ → Carros de alta movilidad en tamaño ISO simple. Todos los carros de esta serie se consideran productos sanitario clase I.

Serie 600 → Carros de transporte de alta movilidad. Todos los carros de esta serie se consideran mobiliario de organización hospitalaria.

Serie 700 → Carros estáticos para almacenamiento. Todos los carros de esta serie se consideran mobiliario de organización hospitalaria.

Serie 500 → Carros de transporte de alta movilidad. Todos los carros de esta serie se consideran mobiliario de organización hospitalaria.

MANUAL DE USUARIO – MANTENIMIENTO

Los carros médicos de INSAUSTI no requieren de mantenimiento técnico; han sido diseñados como elementos compactos para trabajar de forma continua durante más de 25 años.

Sólo una limpieza continua es necesaria.

LIMPIEZA DE PIEZAS DE POLIETILENO

Superficie de trabajo, frentes de cajón, bandeja abatible, accesorios.

Limpieza: mojar una bayeta con agua y jabón, una vez escurrida limpiar la superficie de polietileno.

No mezclar productos químicos en la limpieza del polietileno.

El polietileno puede estar en contacto con muchos productos químicos, en caso de contacto se aconseja no dejar que éstos actúen, realizar una limpieza inmediata.

Alta resistencia: alcohol puro 100% (sin diluir), lejía, detergente, soluciones jabonosas, aceites, grasas, amoníaco acuoso, clorhexidina.

Resistencia parcial: acetona, benceno, éter etílico, gasolina, ozono, tolueno.

No resiste: diclorometano, hidrocarburos fluorados, percloroetileno, tricloroetileno.



LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304

El acero inoxidable requiere una limpieza de mantenimiento continua.

Estructura monobloque, accesorios.

Limpieza: mojar una bayeta con agua y jabón, una vez escurrida limpiar el acero inoxidable.

Secar la superficie rápidamente, utilizar un paño con capacidad de absorción.

Una vez seco el acero se aconseja aplicar un producto de conservación. Ejemplo: Spray limpiador de mantenimiento.

Fabricante: WURTH Ref. 0893121 Antes de su aplicación ver modo de empleo en la etiqueta



No deben emplearse productos clorados.

El acabado de los carros marca INSAUSTI es satinado fino, esto permite eliminar rayas finas utilizando un pliego de satinar actuando en la misma dirección del satinado.

LIMPIEZA DE CAJONES ISO

Cajones ISO 600 x 400 mm: ABS. Lavado en máquina:

Máximo +60° C / Mínimo -20° C

Separadores: PC, policarbonato transparente. Lavado en máquina:

Máximo +120° C / Mínimo -40° C



Lavable en caliente, lavadoras sanitarias en las que la temperatura de secado es 90° C.
Ambos: Limpieza manual, mojar una bayeta con agua y jabón, una vez escurrida limpiar.

MANUAL DE MANTENIMIENTO – ENSAMBLAJE DE LOS ACCESORIOS

INSAUSTI entrega sus carros con los principales componentes ya ensamblados:

- Tirador.
- Ruedas.
- Cajones completos.
- Tarjetas de identificación

Y también muchos de sus accesorios:

- Sistemas de bloqueo
- Soporte para botellas de gas.
- Bandeja abatible
- Rieles
- Bases de conexión eléctrica.

El resto de los accesorios, deben de ensamblarse de acuerdo a sus correspondientes instrucciones de montaje:

- Soporte de 3 cajas de guantes
- Portadocumentos
- Soporte de unidad de aspiración
- Papeleras
- Soportes laterales
- Contenedores de catéteres
- Apoyo contenedor desechable
- Dispensadores de gel
- Accesorios elevados.

Cada carro llevará las instrucciones para el montaje particular de estos accesorios.

MANUAL DE USUARIO – REPARACIONES

En caso de cualquier daño, los carros médicos de INSAUSTI pueden ser fácilmente reparables en destino.

De acuerdo con el número de serie de cada carro, INSAUSTI suministrará bajo petición las piezas de repuesto necesarias, así como las correspondientes instrucciones para reparar correctamente el daño.

INSAUSTI puede suministrar piezas de repuesto para sus carros durante más de 10 años.

MANUAL DE USUARIO – MEJORAS

Los carros médicos de INSAUSTI están diseñados para fácilmente ser mejorados a futuro con la instalación de nuevos accesorios.

De acuerdo con el número de serie de cada carro, INSAUSTI proveerá bajo petición los accesorios que pueden ser instalados, así como las instrucciones correspondientes para su montaje.