

INSTRUCCIONES PARA BIOMBOS Marca Orla ®

Fabricante: Orla Equipamientos Clínicos, S.L.
C/ Torno 10 Pol. Ind. Santa Ana - Rivas Vaciamadrid
28529 Madrid, España (Spain)
Tel./Fax: (+34) 91 499 0096
e-mail: orlaec@orlaec.com

¡¡ LEER DETENIDAMENTE!!

El fabricante declina toda responsabilidad derivada del uso inadecuado del producto.



- Los biombos de dos, tres o cuatro cuerpos se fabrican de acero inoxidable o laminado en frío, con piezas de plásticas de inyección. Las secciones se cubren con telas de poliéster 100% o placas de metacrilato.
- **ANTES de manipular o mover el biombo asegúrese de que tiene espacio suficiente para la operación que quiere realizar.**
- **NO realice movimientos bruscos con el biombo, evite golpear a las personas u objetos en os alrededores del biombo.**

**Estructura**

- Las estructuras de los son de acero inoxidable o acero laminado en frío con recubrimiento de resinas epoxy o cromo.

Material de las secciones

- Telas de poliéster 100%, lavables
- Metacrilato.

MANTENIMIENTO

- Para evitar un envejecimiento prematuro del producto debe seguir un mantenimiento regular (cada 15 días aprox.). Limpie la estructura del Producto con un paño húmedo y agua jabonosa, asegúrese de retirar el jabón y seque completamente con un paño. Evite los excesos de humedad. Evite los limpiadores agresivos como disolventes, ácidos, lejía, amoníaco, etc. En el caso de manchas tratar **INMEDIATAMENTE** con agua jabonosa.
- **Para lavar las telas sin desmontarlas utilice un paño húmedo o spray con solución desinfectante (máximo lejía al 5% en agua). Retirar humedad sobrante con un paño seco.**
- **Para lavar a máquina, desmóntelas arqueando levemente las varillas de sujeción y lávelas en frío con agua y detergentes no agresivos. Vuelva a colocarlas INMEDIATAMENTE Y AÚN HÚMEDAS en el biombo para evitar arrugas.**
- Las placas de metacrilato se limpian como la estructura, atendiendo especialmente a evitar el rayado de la superficie.
- Cualquier otro procedimiento de conservación, será responsabilidad del usuario.

GARANTÍA

- El fabricante garantiza la reparación del producto ante defectos de fabricación, incluyendo mano de obra y piezas, durante un periodo de VEINTICUATRO MESES (24) a partir de su adquisición. Esta garantía se aplica al producto y los accesorios suministrados si se manejan de acuerdo a las instrucciones de uso, presentando la factura de compra. La garantía no se aplicará si las disfunciones son debidas al uso y/o desgaste normales, si el producto hubiera sido manipulado por personal no autorizado, si se producen daños ocasionados por accidentes, caídas, golpes, exposición a ambientes degradantes, humedades, fuego, negligencia, uso y/o mantenimiento incorrectos, etc, y en general si la causa no es imputable al fabricante.