

INSTRUCCIONES DE USO

MESAS DE MASAJE, TRATAMIENTO Y EXAMEN SERIE MRS – Marca ORLA®

(PARA MODELOS MRS.2060 / MRS.2160 Y MRS.3060 CON SECCIONES ACTUADAS A GAS)



¡¡ LEER DETENIDAMENTE!!

El fabricante declina toda responsabilidad derivada del uso inadecuado del producto.

Este producto ha sido diseñado y fabricado siguiendo las directrices marcadas por la "Directiva Europea sobre Productos Sanitarios 93/42/CEE (Real Decreto 414/1996)", y las Normativas a las que se remite CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Dependiente de modelo y variantes:

- Peso aprox.: 75-90 Kg.
- Dimensiones Totales:

Ancho [mm]:	700
Largo [mm]:	1.950
Alto [mm]:	540-900

CARACTERÍSTICAS, PRESTACIONES Y USO



- **PESO MAXIMO DEL OCUPANTE: 225 Kg (distribuido uniformemente sobre toda la superficie del lecho).**

- Su finalidad es la de acomodar a pacientes con posible enfermedad o lesión para su tratamiento, examen, masaje, manipulación, etc.
- La forma de acomodación, elevación, transporte, manipulación del paciente y/o el desempeño de otras funciones secundarias será distinta dependiendo del modelo y variantes del producto. Para ello, es posible que se requiera al menos una tercera persona, o más en el caso de que el paciente tenga la capacidad funcional reducida.
- Su utilización no requiere habilidad alguna ni entrenamientos especiales.
- Su utilización prevista es para ambientes hospitalarios, y cualquier otro de inferior severidad.

▪ Sistema de elevación hidráulico:

Para elevar la mesa pisar y soltar repetidamente el pedal bilateral situado en la parte trasera de la mesa identificable por unos protectores de pedal rojos, hasta alcanzar la altura deseada. Para descender, accionar y mantener presionado con el pie el pedal ubicado en el centro de la base de la mesa, referenciado igualmente con un protector de color rojo, hasta conseguir la posición deseada.



Mientras se realizan estas operaciones vigilar que no haya objetos encima del bastidor al subir o debajo al bajar que impidan dicha operación.

▪ Sistema de elevación eléctrico (Verifique alimentación 220v/50Hz - 120V/60Hz):

Para elevar la mesa pisar el pulsador con una flecha hacia la mesa del pedal con conector al actuador eléctrico, hasta alcanzar la altura deseada. Para descender, hacer lo mismo en el pulsador con la flecha hacia fuera.



Mientras se realizan estas operaciones vigilar que no haya objetos encima del bastidor al subir o debajo al bajar que impidan dicha operación.

▪ Sistema de rodadura centralizado:

Para mover la mesa pisar el pedal referenciado con un protector de color negro, en su extremo más elevado en cualquiera de los dos extremos de la mesa hasta que quede fijo en su nueva posición (abajo). La mesa estará apoyada sobre las ruedas y lista para su traslado. Para volver a fijarla pisar el extremo contrario. La mesa estará apoyada rígidamente sobre las patas.



NUNCA UTILICE LA MESA PARA TRANSPORTAR PACIENTES.

El sistema diseñado para mover la mesa dentro del área hospitalaria donde se instale, NO PARA SU TRANSPORTE.

Si necesita trasladar la mesa, utilice los medios adecuados y seguros para tal fin.

EVITE LOS ESCALONES Y SUELOS RUGOSOS

▪ Sistema de respaldo por cilindro de gas:

Las palancas de accionamiento se encuentran a ambos lados del respaldo. **Pulsando** de ella hacia arriba se libera el cilindro de gas, permitiendo mover el respaldo a la posición deseada, soltar la palanca al alcanzarla.



Mientras se realizan estas operaciones vigilar que no haya objetos encima o debajo de la sección que impidan dicha operación y cuidar de no pillarse manos o dedos.



▪ Sistema de sección central por cilindro de gas:

Las palancas de accionamiento se encuentran en ambos laterales de la mesa. Pulsando cualquiera de ellas se liberan los resortes de gas, permitiendo mover la sección a la posición deseada, soltar la palanca al alcanzarla.



Mientras se realizan estas operaciones vigilar que no haya objetos encima o debajo de la sección que impidan dicha operación y cuidar de no pillarse manos o dedos. La sección de piernas está unida a la central y se mueve con ella.

▪ Sistema de sección de piernas por cilindro de gas:

Las palancas de accionamiento se encuentran en ambos laterales de la mesa. Pulsando cualquiera de ellas se liberan los resortes de gas, permitiendo mover la sección a la posición deseada, soltar la palanca al alcanzarla.



Mientras se realizan estas operaciones vigilar que no haya objetos encima o debajo de la sección que impidan dicha operación y cuidar de no pillarse manos o dedos.

▪ Orificio de nariz y tapa:

El orificio se puede tapar o destapar tirando o acoplando directamente la tapa.

Recomendación General: Todas las adaptaciones manuales de las partes del Producto se deben realizar de modo que el usuario controle en todo momento la posición de éstas, así como la velocidad y fuerzas que aparezcan.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES :



- Procure mantener manos y dedos alejados de los mecanismos de ajuste del Producto durante la operación de cambio de posición de sus componentes para evitar atrapamientos. Evitar el atrapamiento de pies entre los espacios libres de la base. Para ello seguir las instrucciones de uso, actuar los sistemas con precaución, y vigilar al usuario y/o terceras personas, especialmente durante las maniobras.
- Mantenga el Producto alejado de fuentes de calor, objetos incandescentes o llamas para evitar el incendio o deterioro del Producto.
- Si detecta cualquier disfunción en el Producto, póngase en contacto con el Fabricante.
- El producto está diseñado para su uso por personal debidamente cualificado.

LIMPIEZA:

- Para evitar un envejecimiento prematuro del producto debe seguir un mantenimiento regular (cada 15 días aprox.). Limpie el Producto (tapizado y estructura) con un paño húmedo y agua jabonosa, asegúrese de retirar el jabón y seque completamente con un paño. Evite la abrasión del tapizado y que el agua penetre por las costuras. Evite los excesos de humedad. Evite los limpiadores agresivos como disolventes, ácidos, lejía, amoníaco, etc. En el caso de manchas tratar INMEDIATAMENTE con agua jabonosa.
- Antes de comenzar las labores de limpieza, **DESCONECTE LA MESA DE LA RED ELÉCTRICA** (solo para modelos eléctricos).
- Cualquier otro procedimiento de conservación, será responsabilidad del usuario.

NOTA: Antes de utilizar un producto de limpieza, se recomienda hacer una prueba en una zona inferior (no visible), para comprobar que su uso no daña la polipiel.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- Para almacenar el Producto colóquelo en lugar interior, seco y con un rango de temperaturas aproximado de 5º a 30ºC, sobre sus 4 apoyos y cúbralo con una tela o similar para protegerlo. Si lo transporta embálelo con plástico burbuja y/o cartón llevándolo bien sujeto. En cualquier caso, evite golpearlo, girarlo o que el Producto soporte alguna carga pesada o le afecte algún factor que pudiera deteriorarlo.
- Modo de desecho/retirada del producto: Sea cuidadoso con el medio ambiente. Siga la reglamentación de su Municipio referente al deshecho del producto.

GARANTIA:

El fabricante garantiza la reparación del producto ante defectos de fabricación, incluyendo mano de obra y piezas, durante un periodo de VEINTICUATRO MESES (24) a partir de su adquisición. Esta garantía se aplica al producto y los accesorios suministrados si se manejan de acuerdo a las instrucciones de uso, presentando la factura de compra. La garantía no se aplicará si las disfunciones son debidas al uso y/o desgaste normales, si el producto hubiera sido manipulado por personal no autorizado, si se producen daños ocasionados por accidentes, caídas, golpes, exposición a ambientes degradantes, humedades, fuego, negligencia, uso y/o mantenimiento incorrectos, etc., y en general si la causa no es imputable al fabricante.