

**INSTRUCCIONES MESAS RECONOCIMIENTO Serie MSR-MCR Orla®**



**Fabricante:** Orla Equipamientos Clínicos, S.L.  
**www.orlaec.com** C/ Torno 10 - Rivas Vaciamadrid  
28522 Madrid, España (Spain)  
Tel./Fax: (+34) 91 499 0096  
web: www.orlaec.com

**UDI Nos.**

8435671501709 8435671501815  
8435671500566 8435671500580

**¡¡ LEER DETENIDAMENTE!!**

*El fabricante declina toda responsabilidad derivada del uso inadecuado del producto.*

*Este producto ha sido diseñado y fabricado siguiendo las directrices marcadas por la "Directiva Europea sobre Productos Sanitarios 93/42/CEE (Real Decreto 414/1996)", y las Normativas a las que se remite CE.*



- Las mesas de reconocimiento se fabrican de acero inoxidable o laminado en frío, tablero aglomerado de madera, gomaespuma y polipiel.

Peso máximo recomendado (distribuido uniformemente sobre toda la superficie del carro camilla: **225 kg.**

**Evite cargas puntuales sobre el lecho (especialmente en los bordes y esquinas).**

**Evite cargas innecesarias sobre el cabecero abatible, no usar como asiento.**



- Aunque está dotada de separadores de seguridad, cuando ajuste el respaldo, mantenga manos y dedos alejados de los mecanismos de ajuste del Producto durante la operación para evitar atrapamientos



- Se deben almacenar en lugares secos y en posición horizontal apoyada en las 4 patas.
- En caso de colocar peso encima, éste debe ser distribuido uniformemente sobre toda la superficie de la mesa cuidando no dañar el tapizado.

**Tapizado**

- El tapizado es de vinilo ignífugo clase M-2, con tratamiento Permablok®.

**Estructura**

- Las estructuras de las mesas de reconocimiento son de acero inoxidable o acero laminado en frío con recubrimiento de resinas epoxy.

**MANTENIMIENTO**

- Para evitar un envejecimiento prematuro del producto debe seguir un mantenimiento regular (cada 15 días aprox.). Limpie el Producto (tapizado y estructura) con un paño húmedo y agua jabonosa, asegúrese de retirar el jabón y seque completamente con un paño. Evite la abrasión del tapizado y que el agua penetre por las costuras. Evite los excesos de humedad. Evite los limpiadores agresivos como disolventes, ácidos, lejía, amoníaco, etc. En el caso de manchas tratar **INMEDIATAMENTE** con agua jabonosa.
- Cualquier otro procedimiento de conservación, será responsabilidad del usuario.
- NOTA:** Antes de utilizar un producto de limpieza, se recomienda hacer una prueba en una zona inferior (no visible), para comprobar que su uso no daña la polipiel.

**GARANTÍA**

- El fabricante garantiza la reparación del producto ante defectos de fabricación, incluyendo mano de obra y piezas, durante un periodo de VEINTICUATRO MESES (24) a partir de su adquisición. Esta garantía se aplica al producto y los accesorios suministrados si se manejan de acuerdo a las instrucciones de uso, presentando la factura de compra. La garantía no se aplicará si las disfunciones son debidas al uso y/o desgaste normales, si el producto hubiera sido manipulado por personal no autorizado, si se producen daños ocasionados por accidentes, caídas, golpes, exposición a ambientes degradantes, humedades, fuego, negligencia, uso y/o mantenimiento incorrectos, etc, y en general si la causa no es imputable al fabricante.