

**INSTRUCCIONES PARA MESAS AUXILIARES MA Marca Orla ®**

**Fabricante:** Orla Equipamientos Clínicos, S.L.  
C/ Torno 10 Pol. Ind. Santa Ana - Rivas Vaciamadrid  
28529 Madrid, España (Spain)  
Tel./Fax: (+34) 91 499 0096  
e-mail: [orlaec@orlaec.com](mailto:orlaec@orlaec.com)

**¡¡ LEER DETENIDAMENTE!!**

*El fabricante declina toda responsabilidad derivada del uso inadecuado del producto.*



- Las mesas auxiliares se fabrican de acero inoxidable AISI304.  
Peso máximo recomendado (distribuido uniformemente sobre toda la superficie de la mesa: **25 kg**
- En caso de colocar peso encima, éste debe ser distribuido uniformemente sobre toda la superficie de la mesa.
- Antes de mover la mesa, asegúrese de que hay espacio libre para hacerlo para evitar golpear otros mobiliario o personas.
- Antes de mover la mesa, asegúrese de los objetos colocados sobre ella están bien asentados y alejados del borde para evitar caídas.
- Mobiliario diseñado para su uso en interior.

**MANTENIMIENTO**

- Para evitar un envejecimiento prematuro del producto debe seguir un mantenimiento regular (cada 15 días aprox.). Limpie el Producto con un paño húmedo y agua jabonosa, asegúrese de retirar el jabón y seque completamente con un paño. Evite la abrasión de las superficies. Evite los excesos de humedad. Evite los limpiadores agresivos como disolventes, ácidos, lejía, amoníaco, etc. En el caso de manchas tratar INMEDIATAMENTE con agua jabonosa.
- Se deben almacenar en lugares secos y en posición horizontal apoyada en las 4 patas.
- Cualquier otro procedimiento de conservación, será responsabilidad del usuario.

**GARANTÍA**

- El fabricante garantiza la reparación del producto ante defectos de fabricación, incluyendo mano de obra y piezas, durante un periodo de VEINTICUATRO MESES (24) a partir de su adquisición. Esta garantía se aplica al producto y los accesorios suministrados si se manejan de acuerdo a las instrucciones de uso, presentando la factura de compra. La garantía no se aplicará si las disfunciones son debidas al uso y/o desgaste normales, si el producto hubiera sido manipulado por personal no autorizado, si se producen daños ocasionados por accidentes, caídas, golpes, exposición a ambientes degradantes, humedades, fuego, negligencia, uso y/o mantenimiento incorrectos, etc, y en general si la causa no es imputable al fabricante.