

INSTRUCCIONES PARA SOPORTES DE SUERO Marca Orla® - SS.XX



Fabricante:

Orla Equipamientos Clínicos, S.L.
C/ Torno 10 - Rivas Vaciamadrid
28529 Madrid, España (Spain)
Tel./Fax: (+34) 91 499 0096
e-mail: orlaec@orlaec.com

UDI Nos.

8435671508869	8435671509125
8435671509026	8435671509583
8435671509682	8435671509613

¡¡ LEER DETENIDAMENTE!!

El fabricante declina toda responsabilidad derivada del uso inadecuado del producto.

Este producto ha sido diseñado y fabricado siguiendo las directrices marcadas por la "Directiva Europea sobre Productos Sanitarios 93/42/CEE (Real Decreto 414/1996)", y las Normativas a las que se remite CE.



- Los soportes de suero se fabrican de acero inoxidable o laminado en frío, con partes de aluminio, aleaciones metálicas, PVC y piezas de plásticas de inyección.
- Peso máximo recomendado por gancho: **1.5 kg**
- EL ajuste de altura se realiza liberando la barra deslizante del apriete producido por la maniqueta situada al final del mástil del soporte. Antes de liberar la maniqueta, asegúrese de que la barra deslizante interior no tiene ninguna carga. Cuando alcance la altura deseada, compruebe que la barra deslizante interior queda bien sujeta por la maniqueta nuevamente, antes de volver a colocar peso en los ganchos. La altura máxima total del soporte NUNCA debe superar los 2 m.
- Los soportes de suero deben usarse exclusivamente en interiores. Con modelos rodantes, asegúrese de que puede desplazarlos sin obstáculos (a cualquier nivel del suelo).
- Se deben almacenar en lugares secos y en posición vertical apoyados en las ruedas.



Estructura

- Los mástiles de los soportes de suero son de acero inoxidable o acero laminado en frío con recubrimiento de resinas epoxy o cromo. Llevan una pieza de plástico inyectado en el extremo superior que aloja la maniqueta de ajuste.

Peanas

- Las peanas pueden ser de aluminio, PVC, aleación metálica o de acero inoxidable. Pueden montar ruedas o apoyos fijos.

MANTENIMIENTO

- Para evitar un envejecimiento prematuro del producto debe seguir un mantenimiento regular (cada 15 días aprox.). Limpie el Producto con un paño húmedo y agua jabonosa, asegúrese de retirar el jabón y seque completamente con un paño. Evite los excesos de humedad. Evite los limpiadores agresivos como disolventes, ácidos, lejía, amoníaco, etc. En el caso de manchas tratar INMEDIATAMENTE con agua jabonosa.
- Cualquier otro procedimiento de conservación, será responsabilidad del usuario.

GARANTÍA

- El fabricante garantiza la reparación del producto ante defectos de fabricación, incluyendo mano de obra y piezas, durante un periodo de VEINTICUATRO MESES (24) a partir de su adquisición. Esta garantía se aplica al producto y los accesorios suministrados si se manejan de acuerdo a las instrucciones de uso, presentando la factura de compra. La garantía no se aplicará si las disfunciones son debidas al uso y/o desgaste normales, si el producto hubiera sido manipulado por personal no autorizado, si se producen daños ocasionados por accidentes, caídas, golpes, exposición a ambientes degradantes, humedades, fuego, negligencia, uso y/o mantenimiento incorrectos, etc. y en general si la causa no es imputable al fabricante.