

CuroCell UNO®

Sistemas automáticos de colchón de aire

Instrucciones de uso; N.º de artículo: 95-001401-ES0000



7331345056173



Índice

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	3
1. Introducción	4
2. Descripción del producto	5
3. Montaje/Instalación	8
4. Utilización	8
5. Reutilización, limpieza y reacondicionamiento.	12
6. Almacenamiento	12
7. Mantenimiento	13
8. Resolución de problemas	13
9. Descripción técnica	14
10. Repuestos	17
11. Opciones y accesorios	18
12. Garantía	18
13. Otra información	19

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes del uso o de realizar una reparación

¡ADVERTENCIA! Para minimizar el riesgo de incendio, lesiones personales y daños materiales/en el equipo, cumpla las siguientes instrucciones:

1. El producto solo se debe instalar y utilizar para el objetivo para el que está previsto de acuerdo con las instrucciones contenidas en este manual y/o en cualquier otra documentación de Care of Sweden. El producto no se debe combinar, montar ni reparar con piezas (p. ej., unidad de control y colchón), accesorios o repuestos que no sean los descritos en este manual o en cualquier otra documentación de Care of Sweden. No se debe modificar el producto de ningún modo.
2. El producto debe situarse y utilizarse de modo que no quede atrapado ni sufra daños. Nota: sobre todo tenga especial cuidado de no quedarse pinzado al utilizar los carriles laterales. Asegúrese siempre de que el colchón tenga el tamaño adecuado para la cama.
3. Controle periódicamente la funcionalidad del producto efectuando un control con la mano (vea la sección 3.3).
4. Cuando el producto se use para personas que necesiten una supervisión especial, por ejemplo niños, se precisa una monitorización continua.
5. El colchón está protegido por una cubierta higiénica; evite el uso de múltiples cubiertas higiénicas, ya que esto puede afectar la permeabilidad al vapor del colchón.
6. La cubierta higiénica impide la penetración de líquidos o aire, pero es permeable al vapor. Compruebe que el usuario esté colocado correctamente para evitar el riesgo de asfixia.
7. Tenga cuidado con los objetos afilados para evitar así dañar la cubierta higiénica.
8. No abra el alojamiento de la unidad de control – existe un riesgo de descarga eléctrica. El servicio y mantenimiento deberá realizarlo siempre Care of Sweden o uno de sus técnicos de servicio autorizados.
9. Dirija el cable de alimentación a la unidad de control con cuidado para evitar tropezos. Asegúrese también de que el usuario esté acostado correctamente en el colchón de acuerdo con las instrucciones y utilice un soporte para el cable, de ser posible.
10. Para evitar el riesgo de estrangulamiento, asegúrese de que el cable y los tubos estén bien dirigidos para evitar que alguien se pueda enganchar en ellos.

Nota: El proveedor sanitario responsable debe informar al usuario/operario de lo siguiente:

11. No utilice el producto en cuartos de baño o donde se corra el riesgo de que la unidad de control entre en contacto con el agua u otros líquidos. A excepción de para realizar la limpieza especificada, no manipule un producto que haya entrado en contacto con agua/líquido. Desenchufe la clavija de la toma eléctrica inmediatamente y envíe el producto a un técnico de servicio autorizado para mantenimiento
12. No lo utilice cerca o en contacto con fuentes de ignición/superficies calientes, como fuego, cigarrillos encendidos, lámparas incandescentes, calefactores o estufas/fuegos abiertos, ya que ello podría dañar el producto.
13. No guarde ni utilice el producto a la luz directa del sol. El producto se puede estropear debido a la temperatura elevada y a la luz ultravioleta.
14. Los campos magnéticos fuertes o el equipo de comunicación inalámbrica (por ejemplo, los productos de la red doméstica inalámbrica, los teléfonos móviles, los walkie-talkies, los teléfonos inalámbricos y sus bases, los radiotransmisores, etc.) pueden afectar a la funcionalidad del producto y deberían mantenerse a una distancia de al menos 1 metro de la unidad de control.
15. No utilice nunca el producto si el cable de alimentación, el enchufe de la unidad de control o el alojamiento de la fuente de alimentación están defectuosos, si el alojamiento de la unidad de control está dañado o si no funciona correctamente. Póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado para su examen y reparación.
16. No conecte nunca nada que no sea la alimentación proporcionada por Care of Sweden al conector del cable de alimentación de la unidad de control.
17. Si la cubierta higiénica está equipada con asas laterales, éstas están diseñadas para manejar o reubicar el colchón. No utilice las asas para levantar el colchón con un usuario tumbado sobre él. Cualquier otro uso será bajo su propia responsabilidad y no está cubierto por la garantía del producto.
18. Para evitar que la alimentación se salga, tenga mucho cuidado cuando haya niños y mascotas en el entorno alrededor del equipo.
19. Se debería evitar utilizar este producto al lado o apilado con otro equipo, ya que ello podría desembocar en un funcionamiento inadecuado. Si este uso es necesario, este producto y el otro equipo deben ser observados para comprobar que funcionan con normalidad.
20. Con el fin de minimizar el riesgo de aparición de heridas en los pies, asegúrese de que el usuario no entre en contacto con los ganchos de la unidad de control.

1. Introducción

CuroCell® IQ Cirrus es un sistema de colchón de aire/espuma automatizado y moderno diseñado para proporcionar una buena comodidad al tiempo que ayuda en la prevención y el tratamiento de úlceras por presión/lesiones por presión. El sistema identifica al usuario y gestiona automáticamente todos los ajustes para adaptar la presión en función de las necesidades del usuario. Las úlceras/lesiones de decúbito no previstas/sin tratar se pueden deteriorar de forma muy rápida, derivando en un aumento del riesgo de complicaciones, dolor y sufrimiento para el usuario.



Lea siempre las instrucciones de uso antes del uso.

Si le surge alguna pregunta sobre la instalación, su uso o mantenimiento, póngase en contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local.

1.1 Información general

Este sistema es un producto sanitario que cuenta con el marcado CE, según la norma MDR (UE) 2017/745. El sistema se ha diseñado en parte o en su totalidad y se ha comprobado de conformidad con las normas enumeradas en la sección 9.2. Normas.


Según la normativa establecida por las autoridades en materia de productos sanitarios, el fabricante debe informar sobre cualquier accidente o incidente relacionado con los productos. Le agradeceríamos que comunicase inmediatamente a Care of Sweden toda la información sobre accidentes o incidentes relacionados con nuestros productos.

1.2 Uso previsto

Los sistemas están compuestos por una unidad de control que controla y gestiona de forma activa el flujo de aire del colchón, lo que permite su uso para prevenir y ayudar en el tratamiento de úlceras/lesiones de decúbito.

1.3 Indicaciones

Adecuado para una amplia gama de personas con mayor riesgo de úlceras/lesiones por presión, incluidas aquellas con úlceras superficiales, hasta la categoría 4, y PU/PI sin clasificar (supuestas lesiones del tejido profundo inestables)¹ (en asociación con un plan de atención individualizado). Los colchones están pensados para su uso por personas con una estatura mínima recomendada de 120 cm.

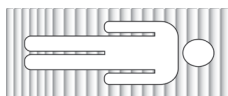

1.4 Contraindicaciones

No se conoce ninguna.

1.5 Usuario previsto

Los sistemas de colchones están destinados a ser utilizados por todo tipo de usuarios, incluidas personas no profesionales. Los sistemas de colchones están destinados a ser utilizados por todo tipo de usuarios, incluidas personas no profesionales.

1.6 Entorno de uso previsto

Los sistemas de colchones se pueden utilizar en todo tipo de entornos de atención médica, incluido el cuidado en el hogar.

Se recomienda cambiar de posición con regularidad. El personal responsable deberá evaluar cada cuánto tiempo es necesario cambiar de posición al usuario, dependiendo de su diagnóstico de estado y situación general. El colchón solo se deberá utilizar tumbándose en sentido longitudinal, con los pies en el extremo marcado con el símbolo correspondiente.

Para utilizar el colchón CuroCell® A4 no se requieren formación ni aptitudes especiales. Está diseñado para manipularlo y entender su funcionamiento de manera sencilla; se recomienda leer la guía rápida y las instrucciones de uso antes de utilizarlo. La prescripción la deben realizar personas autorizadas para ello y con formación clínica. Tenga en cuenta que el usuario también puede ser el operario.

NOTA:

1. Para ciertos usuarios, tales como amputados, puede que no se llegue a la longitud máxima recomendada. Los usuarios de estos grupos, podrían, no obstante necesitar otra configuración, ya que solo una parte del colchón está sometida a carga. Para ver los controles de las funciones, consulte la sección 2.3.
2. Cuando se utilice junto con almohadas de posicionamiento, lea cuidadosamente las instrucciones de uso de las almohadas, a fin de colocar al usuario correctamente.
3. Si se utiliza este producto con un equipo de evacuación, el personal autorizado deberá asegurarse de que se utilice de forma segura para este propósito.
4. Obre con cuidado al usar barandillas u otras protecciones en la cama, de modo que el colchón no quede aplastado ni sufra daños.
5. El colchón no deberá elevarse si un usuario se encuentra sobre él. Tampoco debe emplearse para ningún tipo de transporte del usuario que no sea el recomendado en estas instrucciones.
6. Este colchón no es adecuado para su uso al realizar radiografías debido al riesgo de imagen borrosa o interferencias que pueden dar lugar a un diagnóstico erróneo.
7. Si se utiliza el sistema con una alimentación de red poco fiable, se recomienda el modelo con una batería de seguridad. En caso de que se produzca un corte de corriente o similar, el colchón conservará el aire durante al menos ocho horas.

(1) *European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019*

1.7 Otra información

Plan de acción para úlceras/lesiones de decúbito

Para conseguir el mejor resultado posible con este producto, se recomienda utilizar un entorno de trabajo bien planificado y estructurado. En nuestra guía «Plan de acción para úlceras de decúbito» encontrará ejemplos que pueden aplicarse y ponerse en práctica al utilizar nuestros productos.

La Guía del colchón

Esta guía incluye pautas para el personal y los facultativos a la hora de elegir un colchón de Care of Sweden. CuroCell UNO® es un colchón del grupo de funciones C.

Esta información figura en nuestro sitio web www.careofsweden.com y también puede solicitar una copia a nuestro Servicio de atención al cliente (vea la información de contacto en la última página).


2. Descripción del producto

2.1 Unidad de control y colchón


1. Colchón
2. CPR (desinflado rápido)
3. Unidad de control de conexión del tubo
4. Unidad de control



Colchón

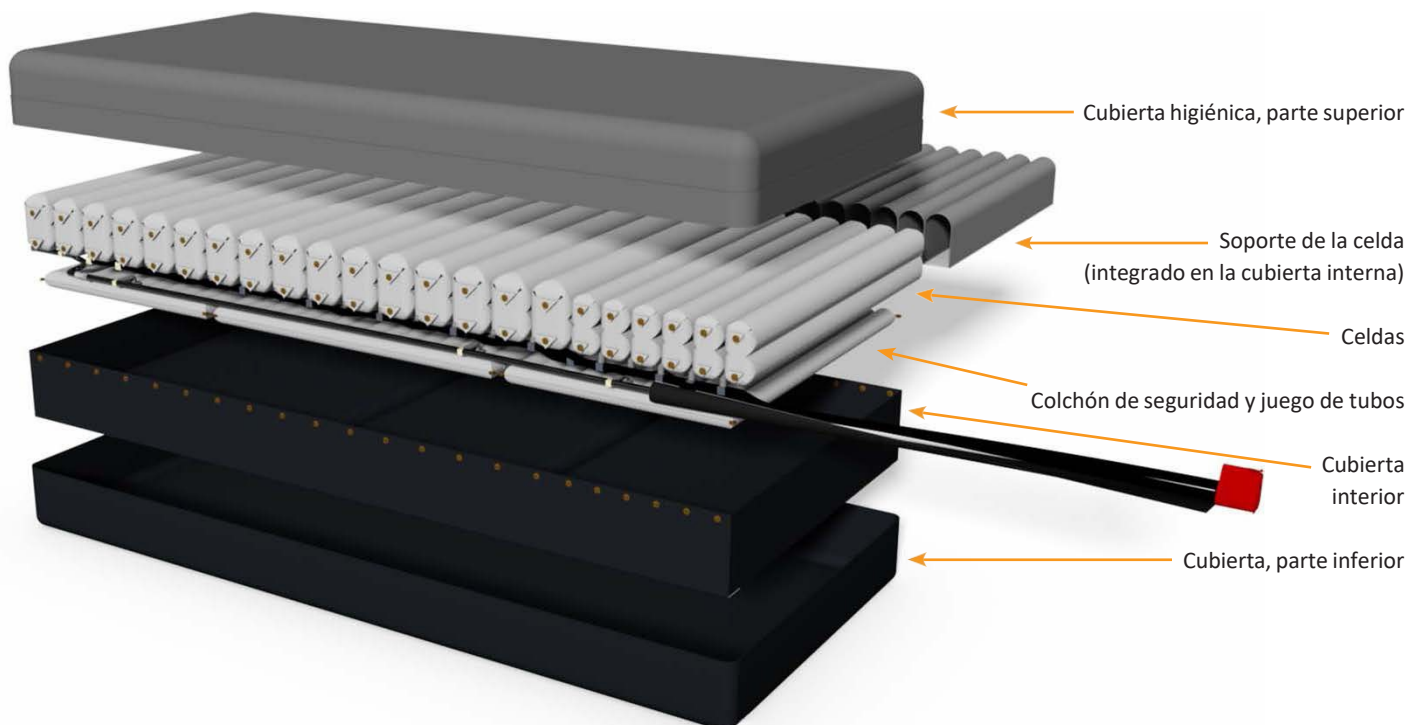

Celdas y juego de tubos

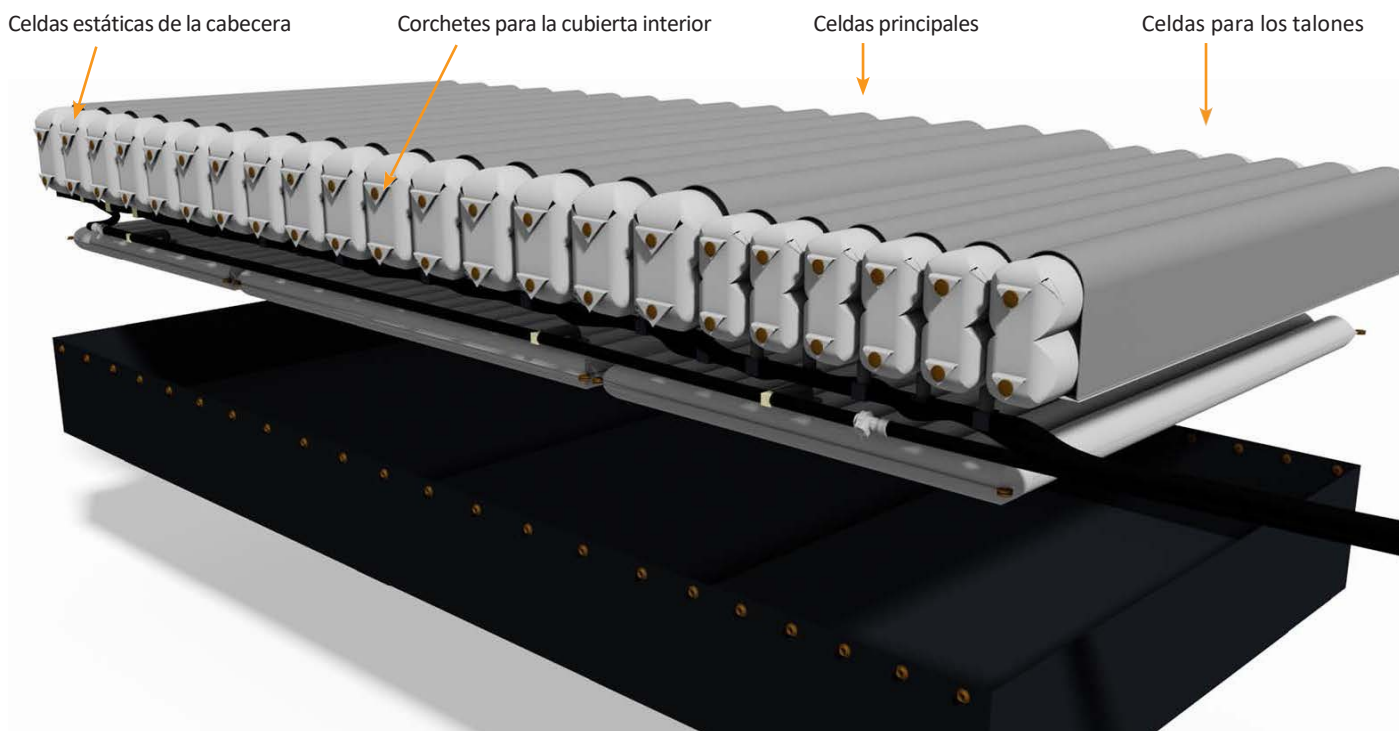

Protector de talones

El colchón lleva una función integrada para aliviar la presión de los talones. Las últimas seis celdas de los pies del colchón (celdas de los talones) se han diseñado para eliminar la presión de los talones sensibles.


Es fácil de manejar y mantener y cumple con los requisitos más exigentes de higiene y limpieza. La cubierta higiénica es permeable al vapor, es decir, se elimina el vapor, reduciendo así el riesgo de maceración en la piel.

Cubiertas


CuroCell UNO® se suministra con una cubierta higiénica.

Cubierta Stone – Una cubierta extraíble con una cremallera antigoteo en los cuatro lados y costuras soldadas.

2.2 Unidad de control

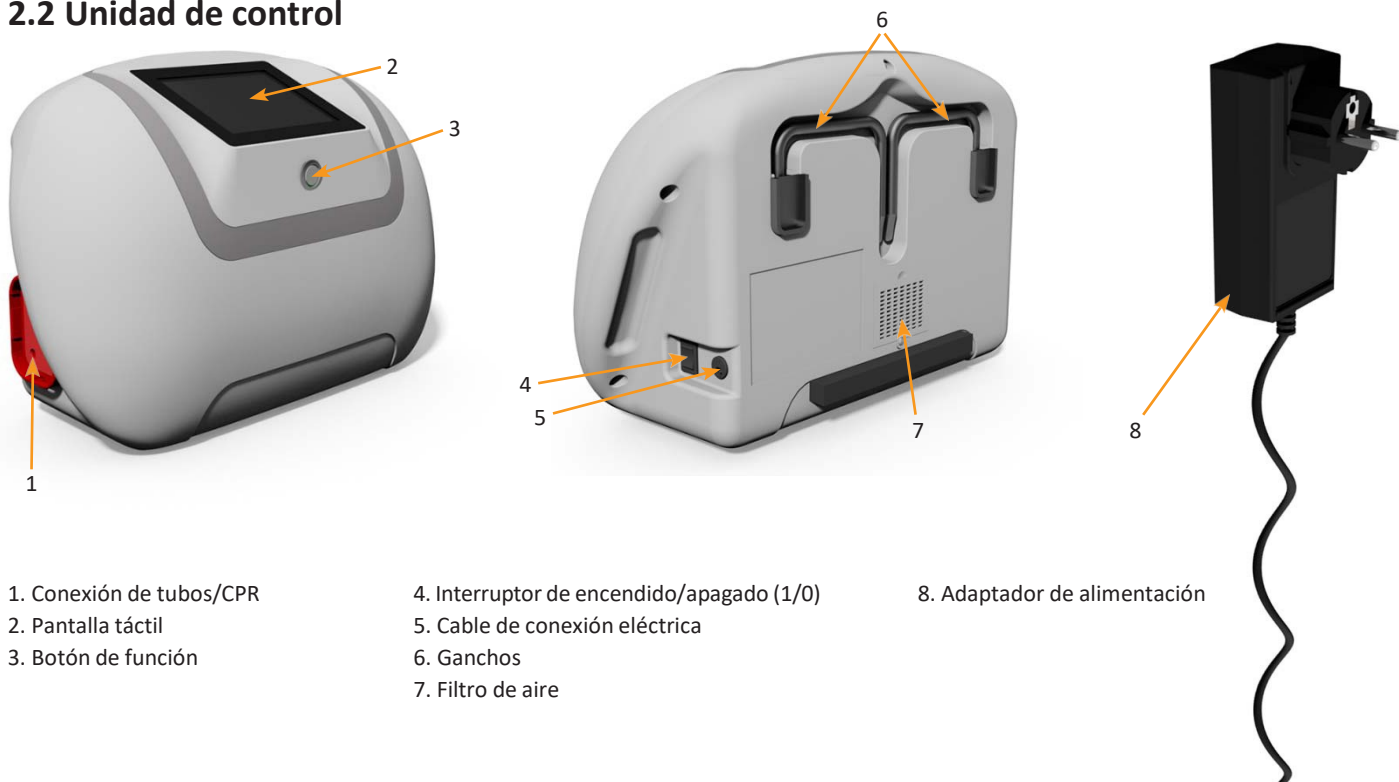

2.3 Funciones de la unidad de control – pantalla táctil

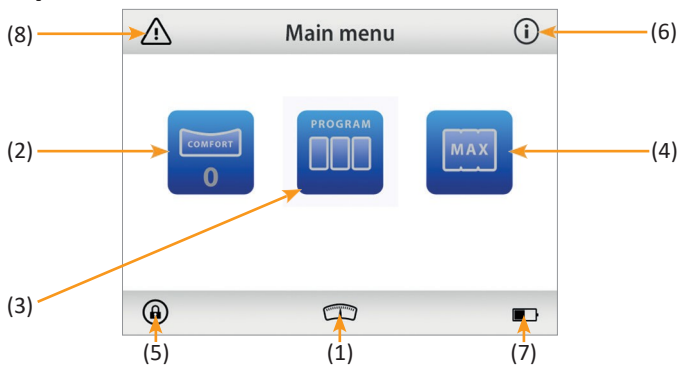

2.3.1. Selección automática (1)



El sistema de colchón regula la presión interna del colchón de forma independiente y sin ajuste manual a diferentes valores en función del peso y la posición del usuario. No se requiere ninguna acción manual para afectar la presión interna del colchón. Esta función funciona de las siguientes tres formas:

1. El sistema realiza una selección automática cuando se ha iniciado.
2. El propio sistema pondrá en marcha esta función si se produce algún cambio significativo durante su uso.
3. El sistema realiza una selección automática a intervalos determinados, incluso si no se ha producido ningún cambio significativo.

Una vez completada la selección automática, el sistema volverá al programa utilizado previamente. Cuando lo encienda por primera vez, la selección es la selección básica del modo de pulsos: 10 minutos.

2.3.2. Selección del confort (2)



Se puede aumentar en dos pasos, dependiendo de los requisitos de confort del usuario. Este aumento se realiza en función de la selección automática realizada por la unidad de control. (La unidad de control establece automáticamente la presión optimizada para el usuario).

2.3.3. Programas (3)

Hay tres programas disponibles. Pulse el botón para alternar entre los programas.



1. Modo alterno. En este modo, la presión alterna entre las celdas. Se puede cambiar el período del ciclo en función de los deseos y los requisitos del usuario. Elija entre 10, 15, 20 o 25 minutos.

Cuanto más largo sea el período del ciclo, más lentas serán las alternancias. Recomendamos una selección básica de 10 minutos.



2. Modo pulsante. Un modo de confort que combina una presión constante baja con el modo alterno. Se puede cambiar el período del ciclo en función de los deseos y los requisitos del usuario. Cuanto más largo sea el período del ciclo, más lentas serán las alternancias.

Recomendamos una selección básica de 10 minutos.



3. Presión constante baja. En este modo, la presión será la misma en todas las celdas. También se denomina «presión baja».

NOTA:

- Durante el funcionamiento de la batería, se puede seleccionar el modo de presión baja constante y de pulsos, pero no se puede elegir el período del ciclo. El período del ciclo será de 20 minutos (o más largo, si se ajustó antes de la transición al funcionamiento de batería).



2.3.4. Presión máxima (modo de cuidado) (4)

Con esta función, se llena por completo de aire el colchón y se obtiene un apoyo fijo.

Esta función cambia automáticamente a la selección anterior al cabo de unos 20 minutos. La función debería utilizarse cuando se está asistiendo al usuario, cuando se le cambia de posición, o cuando se le mete o se le saca de la cama.



NOTA:

- La selección automática se desactiva cuando se usa este programa.



2.3.5. Bloqueo de pantalla (5)

Pulse el botón de Bloqueo de pantalla para bloquear o desbloquear la pantalla. En pantalla se indica si esta se ha bloqueado. La pantalla se bloquea automáticamente si no se toca durante cinco minutos. Lo hace para prevenir que se cambie la selección por accidente.

Para desbloquearla, pulse el candado  y confirme volviéndolo a pulsarlo. 








2.3.6. Información (6)

Con este botón podrá acceder al menú de información.

En el menú de información, encontrará:

- Información sobre el producto
- Datos de contacto de Care of Sweden
- Acceso directo a una visita rápida
- Función de desinflado


Si la unidad de control está equipada con una batería de seguridad (variante), el estado de la batería se muestra de la siguiente manera:

	Batería 100 %
	Batería 75 %
	Batería 50 %
	Batería <25 %. Cargar inmediatamente (la unidad de control prepara el modo terapéutico de baja presión constante).
	Batería cargando

NOTA:

- Para garantizar una función y estado óptimos, la batería de seguridad nunca se debería descargar por completo.
- La batería se carga cuando la unidad de control está operando.
- Una batería totalmente cargada dura al menos cinco horas.
- Si se deja la unidad de control sin funcionar durante mucho tiempo, la batería de seguridad se debería cargar cada seis meses con fines de mantenimiento.


2.3.8. Notificaciones (8)

Las notificaciones se indican mediante  en el extremo superior izquierdo después de la confirmación (desactivación). En la sección 4.6 puede encontrar más información sobre las notificaciones.

3. Montaje/Instalación

Al desembalar el colchón, compruebe que ninguna pieza esté dañada. Si detecta algún daño, póngase en contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local antes de utilizar el producto.


1. Coloque el colchón sobre el somier. Sujete el colchón a la cama con las correas de la parte inferior del colchón.

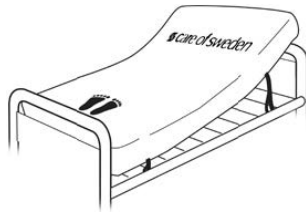


Nota:

- Asegúrese de que el colchón tenga el tamaño adecuado para la cama.
- Haga la cama con sábanas para mayor comodidad.
- Si se utiliza una cama ajustable, el colchón debería fijarse solo a las partes móviles de la cama.
- Compruebe las celdas y los corchetes para asegurarse de que están montados correctamente.

2. Suspense la unidad de control en el extremo de los pies de la cama o colóquela sobre una superficie nivelada y firme.

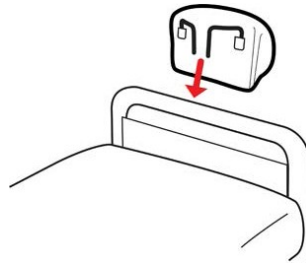


- Coloque el cable eléctrico en el soporte para el cable del colchón abriendo los corchetes, poniendo el cable en el hueco y volviendo a cerrar los corchetes.
- Si no usa el soporte para el cable: Tienda el cable eléctrico de modo que no se corra el riesgo de tropezar con él, que las ruedas de la cama no puedan pisarlo y que no quede trabado al elevar o descender la cama.

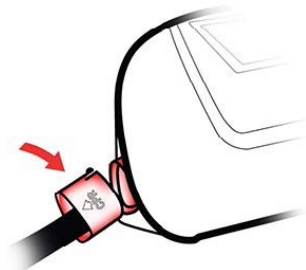

3. Conecte los tubos de aire (marcados como «CPR») que salen del colchón en el lado de la unidad de control. Oirá un clic cuando estén conectados correctamente. Compruebe siempre que se hayan conectado correctamente.

4. Compruebe que el interruptor situado en el lateral esté en la posición 0 (apagado). Enchufe el adaptador de alimentación a una toma eléctrica aprobada (100-240 V).

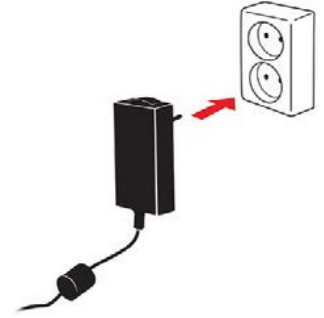

Compruebe que el cable eléctrico se haya conectado correctamente a la unidad de control y que se haya utilizado la alimentación correcta. (Vea la sección 9.1 Especificaciones técnicas. En la etiqueta del adaptador de alimentación se debe indicar el número de pieza correcto.) El adaptador de alimentación forma parte del equipo y no se puede sustituir. Si la unidad de control se ha almacenado a su temperatura de almacenamiento mínima o máxima (-25 °C o 70 °C), espere por lo menos 1 hora antes de arrancarla. Este tiempo se basa en una temperatura ambiente de 20 °C.

NOTA


- En el caso de la asistencia doméstica y en las residencias, se deben utilizar siempre equipos de la clase de seguridad eléctrica II (vea la sección 9.3. Etiquetado).
- En hospitales y centros similares, se pueden utilizar equipos una clase de seguridad eléctrica I o II, en función de si la toma eléctrica está conectada a tierra o no. (Consulte la sección 9.1 Especificaciones técnicas.)
- No mantenga la clavija de 12 V en el adaptador de alimentación mientras toque al usuario.
- Enchufe el adaptador de alimentación a una toma eléctrica de fácil acceso en caso de que sea preciso desenchufarlo y cortar por completo la alimentación de la unidad de control.
- Compruebe que los cables y los tubos estén dispuestos de tal forma que ni el usuario ni niños se puedan enganchar en ellos, con el consiguiente riesgo de estrangulamiento.
- Utilice siempre el cable de alimentación al arrancar la unidad de control. Esto también se aplica si la unidad de control tiene una batería de respaldo. La unidad de control no se iniciará alimentada por la batería.

4. Utilización




Nota: Lea siempre las instrucciones de uso antes del uso.

4.1 Inicio

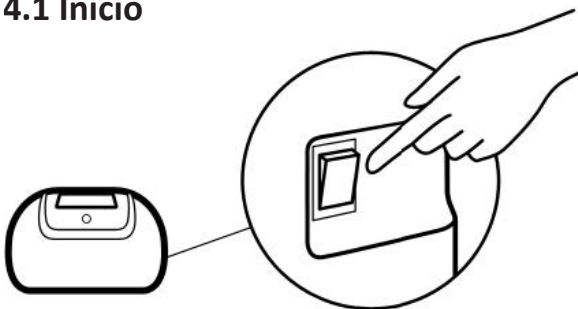

1. Coloque el interruptor de encendido/apagado situado en el lateral de la unidad de control en la posición 1 (encendido).

2. Se empezará a bombear aire al colchón. En función de su tamaño, el colchón tardará aproximadamente 20-40 minutos hasta inflarse del todo (90x200 cm = 20 minutos).

3. El colchón se puede utilizar cuando el botón de función  de la parte delantera de la unidad de control esté de color verde.

NOTA:

- Cada vez que se arranque el sistema, la unidad de control siempre empieza inflando del todo el colchón de seguridad, después las otras celdas, y luego realiza un ajuste automático. Para obtener más información, consulte la sección 2.3. Una vez completada la selección automática, pasa a una selección básica del modo alterno (cuando se utiliza por primera vez) o a la selección previa.
- Si es necesario, el usuario puede estar tumbado en el colchón aunque este no se encuentre inflado. En ese caso, el colchón de seguridad soportará la carga.
- Si se utiliza un colchón con un colchón de seguridad de aire, este deberá inflarse.

4.2 Selección del programa




Se pueden seleccionar tres programas distintos: Alternativo, de pulsos y CLP (presión baja constante). Se recomienda el modo alternativo como selección básica.




Hay otro programa denominado «Presión Máxima». Este modo se utiliza cuando se está asistiendo al usuario, cuando se le cambia de posición, o cuando se le mete o se le saca de la cama.

Consulte la sección 2.3 para obtener información más detallada.

4.2.1 Selecciones elegidas

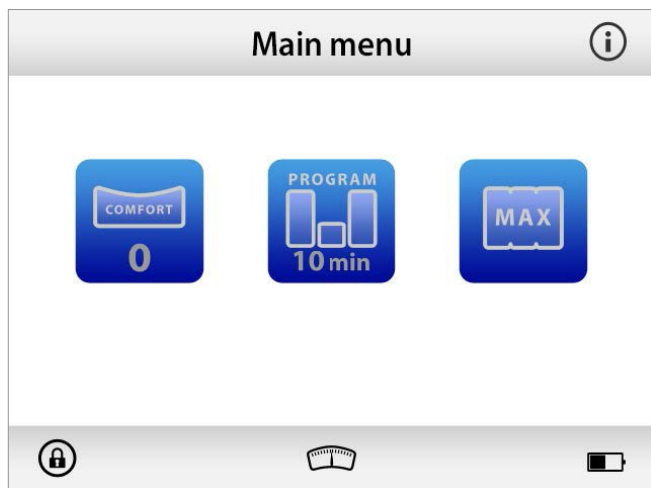

Las selecciones actuales elegidas siempre se muestran en los símbolos del programa en el menú principal. En el ejemplo anterior, las selecciones son «Alternativo – 10 minutos».

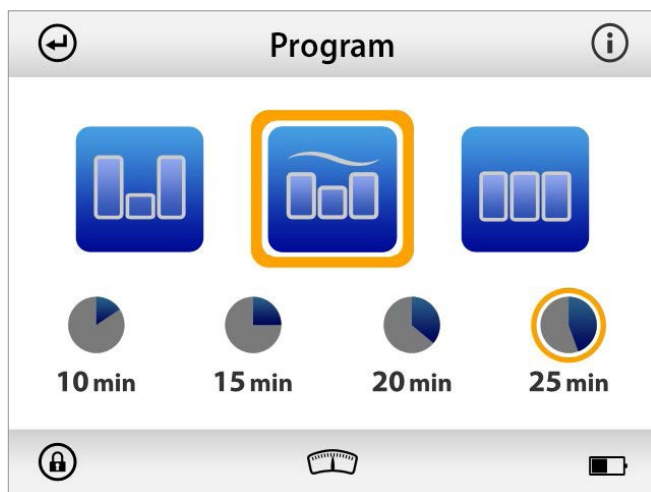

En el menú del programa, las selecciones se muestran con un marco de color naranja que rodea la selección elegida. En el ejemplo anterior, las selecciones son «De pulsos – 25 minutos».

4.3 Selecciones de confort, selecciones precisas




La presión del aire del colchón se puede ajustar en tres fases: una selección básica determinada por la unidad de control (0) en función del peso del usuario, que se puede aumentar en dos fases (+1 o +2) según los deseos del usuario.

Nota: Cuando solamente se someten a carga algunas partes del colchón, por ejemplo, en el caso de los amputados, quizás sea necesario aumentar el nivel de selección usando las selecciones de confort.

La selección elegida se muestra en el menú principal y en el menú confort rodeada por un marco de color naranja.

Vea el punto 4.2.1 anterior.

4.4 Control con la mano (control de las funciones)

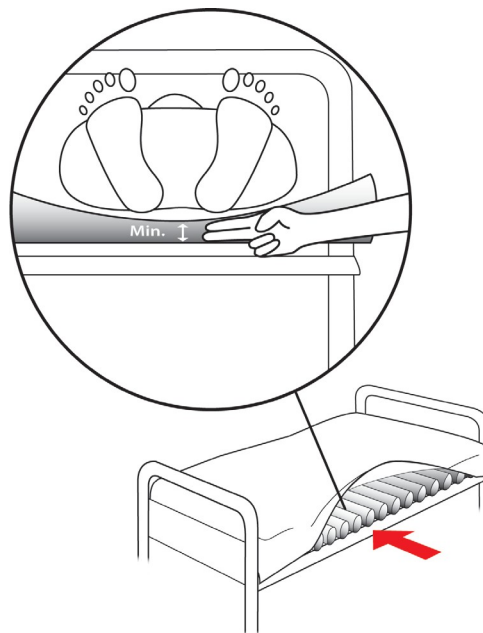


El control con la mano se utiliza para comprobar que el colchón esté funcionando correctamente.

Debe realizarse periódicamente. Se recomienda hacerlo una vez por turno, o cada ocho horas.

Abra la cubierta e introduzca la mano entre las cámaras superiores que se encuentran bajo la zona pélvica del usuario (el centro del colchón). Asegúrese de que haya un hueco con el colchón inferior, de tal forma que el usuario no «toque fondo». Se recomienda un hueco de un ancho de uno o dos dedos. Si el hueco es demasiado pequeño, vuelva a intentarlo. Vea la sección 8 de resolución de problemas.

4.5 CPR

En el caso de una emergencia en la que sea necesario practicar una CPR (reanimación cardiopulmonar), quite la conexión (con la marca «CPR») de la unidad de control para vaciar el aire del colchón de manera rápida.

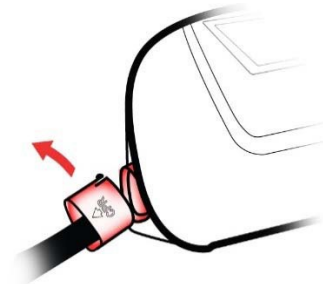

4.6 Notificaciones



Existen diversas notificaciones en función de la gravedad de la advertencia:

Notificación principal:

El error es muy importante para el funcionamiento o la función, y la unidad de control indicará un error mostrando información en la pantalla, con una notificación sonora y luminosa.

Al cabo de 10 minutos, la frecuencia de la notificación sonora se reduce si no se confirma. En la pantalla se muestra información sobre el tipo de error, vea a continuación los tipos de notificación. Las notificaciones importantes no se pueden confirmar (desactivar) sin subsanar el error. La notificación sonora se puede silenciar temporalmente a través del botón de función, pero volverá a aparecer al cabo de aproximadamente 5 minutos a menos que se subsane el error.

En caso de producirse un corte eléctrico y unas temperaturas altas en el sistema, la información no se muestra en la pantalla, sino que se produce una notificación sonora y luminosa con el botón de función hasta que se agota la electricidad.

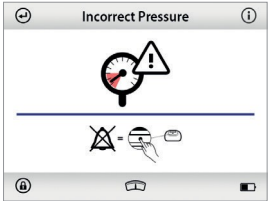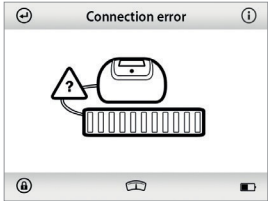Notificaciones importantes, descripción y resolución de problemas	
<p>A Corte eléctrico (la unidad de control recibe una potencia eléctrica insuficiente)</p>	<p>Cuando la unidad de control deja de recibir potencia eléctrica, activa una advertencia sonora y una luz naranja en el botón de función. Desactive la notificación sonora pulsando el botón de función de la parte delantera. La unidad de control se apagará cuando la potencia eléctrica que contiene se haya utilizado por completo.</p> <p>Asegúrese de que el adaptador de alimentación esté conectado a la pared y a la unidad de control. Compruebe también que el interruptor de encendido/apagado situado en el lateral de la unidad de control esté colocado en la posición 1 (encendido).</p>
<p>B Temperatura alta en el sistema</p>	<p>Cuando la temperatura de la unidad de control se eleva demasiado, se activan una advertencia acústica y una luz naranja en el botón de función. Desactive la notificación sonora pulsando el botón de función de la parte delantera. La unidad de control se apagará sola para refrigerarse. La unidad de control se reiniciará después de la refrigeración.</p> <p>Asegúrese de que el filtro de la unidad de control no esté obstruido y de que la unidad de control no esté expuesta a la luz directa del sol.</p>
<p>C Presión baja/alta</p>	<p>En caso de que haya una presión alta/baja en el colchón, se activan unas advertencias sonoras y luminosas. Desactive la notificación sonora pulsando el botón de función de la parte delantera.</p>  <p>Se activa de nuevo pasados unos cinco minutos, si la presión no ha vuelto a la normalidad.</p> <p>Compruebe todas las conexiones del colchón y que la conexión de CPR esté conectada correctamente.</p>
<p>D Error de conexión</p>	<p>Si el colchón no consigue la presión de aire correcta al cabo de 20-40 minutos (en función del tamaño del colchón) desde el encendido y durante el llenado, la unidad de control avisará de un error de conexión. Desactive la notificación sonora pulsando el botón de función de la parte delantera. Se activa de nuevo pasados unos cinco minutos, si el error de conexión no se ha rectificado.</p>  <p>Asegúrese de que la conexión del tubo esté instalada correctamente en la unidad de control. Asegúrese de que el colchón sea del tamaño correcto para la unidad de control (lo puede comprobar en el número del artículo, por ejemplo, 080200 significa 80x200 cm tanto en el colchón como en la unidad de control).</p>

Si el problema persiste o vuelve a aparecer con frecuencia, póngase en contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local.

Notificaciones



Las notificaciones se muestran a través de un triángulo de advertencia en el menú principal, con una imagen en pantalla dedicada o simplemente mediante una notificación sonora y luminosa parpadeante de color naranja en el botón de función de la parte delantera.



Las notificaciones se silencian y se confirman (desactivan) mediante el botón de función de la parte delantera. En caso de problemas con las Notificaciones, consulte la sección 8 de resolución de problemas.

ADVERTENCIA

- Si la presión del aire permanece baja, busque daños en el colchón y los tubos. Realice las reparaciones cuando sea necesario o póngase en contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local.

Notificaciones silenciosas

El error tiene una importancia menor o ninguna importancia para el funcionamiento o la función y no debería molestar al usuario de forma innecesaria. La notificación silenciosa también contiene información.

Ejemplos de estas notificaciones son las notificaciones de servicio, en las que la unidad de control muestra el error/la alteración utilizando el botón de función. En la pantalla se muestra información sobre el tipo de error (vea los tipos de notificaciones a continuación) y, cuando lo confirma, el sistema sigue funcionando con el triángulo encendido en la esquina izquierda del menú principal.

Notificaciones silenciosas


Servicio

Si la unidad de control necesita servicio, se indicará con una imagen.

Los códigos de servicio hacen referencia a distintas acciones de servicio, en función de la versión del firmware que tenga instalada la unidad de control.



Para saber qué versión de firmware hay instalada, pulse el botón de información de la pantalla.



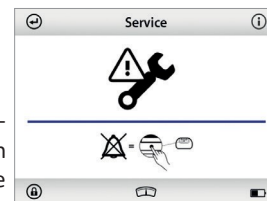

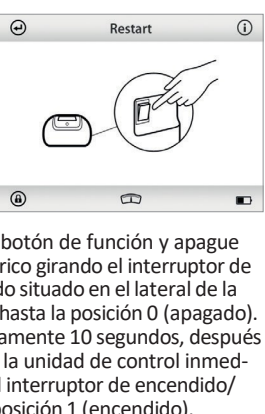


Códigos de servicio

Firmware	Código de servicio: 1	Código de servicio: 2	Código de servicio: 3
1.0/1.0	Fuga en el sistema (Se precisa servicio)	Error de carga de la batería (Se precisa servicio)	Error del reloj de tiempo real (Se precisa servicio)
1.0/2.0	Fuga en el sistema (Se precisa servicio)	Error de carga de la batería/Error del reloj de tiempo real (Se precisa servicio)	Autoajuste/Maxfirm iniciados con demasiada frecuencia (No es preciso hacer ninguna acción)
1.0/2.1	Fuga en el sistema (Se precisa servicio)	Error de carga de la batería/Error del reloj de tiempo real (Se precisa servicio)	Maxfirm iniciado con demasiada frecuencia (No es preciso hacer ninguna acción)

Estos códigos de servicio proporcionan información sobre desvíos menores del sistema que no influyen directamente en la función, pero para los que se debería planificar un servicio.

Intente siempre volver a arrancar el dispositivo antes de ponerse en contacto con el departamento de servicio, consulte 4.9.
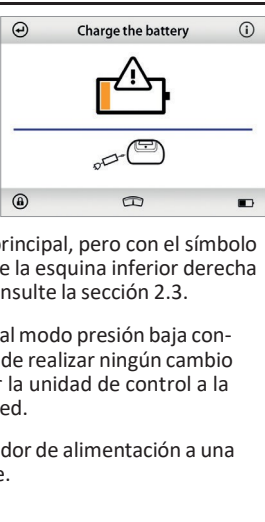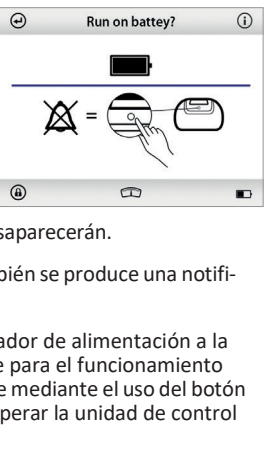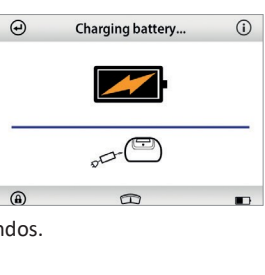
<p>F Potencia eléctrica baja (durante el funcionamiento con batería con batería de seguridad)</p>	<p>En caso de que se produzca una potencia eléctrica baja durante el funcionamiento con la batería, pulse el botón de función y el software volverá al menú principal, pero con el símbolo de 'batería baja' de la esquina inferior derecha encendido (7). Consulte la sección 2.3.</p> <p>El programa pasa al modo presión baja constante y no se puede realizar ningún cambio antes de conectar la unidad de control a la alimentación de red.</p> <p>Conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente.</p>	
<p>G Cambio a arranque con funcionamiento de la batería</p>	<p>Cuando arranque el sistema <u>con la batería de seguridad</u>, es necesaria una confirmación, afirmando que el sistema debería arrancar y las imágenes desaparecerán.</p> <p>En este caso, también se produce una notificación acústica.</p> <p>Conecte el adaptador de alimentación a la toma de corriente para el funcionamiento normal o confirme mediante el uso del botón de función para operar la unidad de control con la batería.</p>	
<p>H Cargando batería</p>	<p>Indica que la alimentación de red está conectada y que la batería se está cargando.</p> <p>Se apaga automáticamente al cabo de 5 segundos.</p>	
<p>I Funcionamiento de la batería</p>	<p>Indica que la unidad de control ha pasado al funcionamiento con batería.</p> <p>Se apaga automáticamente al cabo de 5 segundos. Conecte el adaptador de alimentación a la toma de corriente para el funcionamiento normal o permita que la unidad de control funcione con batería.</p>	
<p>J Reinicio</p>	<p>Cuando es preciso reiniciarla, la unidad de control lo indica mediante un sonido y el botón de función de color naranja.</p> <p>Confírmelo con el botón de función y apague el suministro eléctrico girando el interruptor de encendido/apagado situado en el lateral de la unidad de control hasta la posición 0 (apagado). Espere aproximadamente 10 segundos, después vuelva a encender la unidad de control inmediatamente y gire el interruptor de encendido/apagado hasta la posición 1 (encendido).</p>	

4.7 Función de transporte




Si es preciso mover al usuario en la cama, se puede quitar el adaptador de alimentación de la toma de la pared y dejar la unidad de control en un extremo de la cama durante el transporte. Para un confort óptimo, Care of Sweden recomienda colocar primero la unidad de control en modo de presión baja y esperar cinco minutos antes de desconectarlo. El colchón retendrá el aire durante al menos ocho horas.

Si la unidad de control está dotada de una batería de seguridad, pasará automáticamente a utilizarla cuando se desconecte el cable de alimentación de red. La unidad de control pasará automáticamente al modo presión baja constante y avisará con suficiente antelación antes de que la batería se agote del todo. La batería dura al menos cinco horas.

Recomendamos utilizar esta función solo durante breves periodos de tiempo.

4.8 Función Pack&Go® (desinflado)

Después de utilizarlo, puede embalar el producto de la siguiente manera:


- Asegúrese de que no haya nadie tumbado en el colchón.
- En el menú principal, pulse  en la esquina superior derecha.
- Así podrá acceder al menú de Información desde el que puede activar la función de Desinflado. 
- Confirme pulsando .

El botón de función parpadeará de color naranja durante el desinflado. El aire del colchón se vaciará y estará listo para simplemente plegarse en 20 minutos. La unidad de control emite una señal acústica cuando el desinflado se haya completado.

Doble con cuidado el colchón, coloque la unidad de control entre los pliegues y colóquelo dentro de la bolsa de transporte (accesorio) o equivalente para almacenarlo de forma segura. Asegúrese de que el adaptador de alimentación esté embalado. Una vez completado Pack&Go, el sistema vuelve a la configuración de fábrica.

Si le surge alguna pregunta sobre la instalación, uso o mantenimiento, póngase en contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local.

4.9 Reinicio

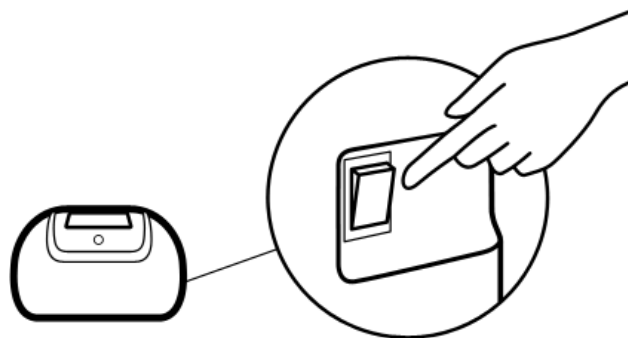

En caso de tener que reiniciar, coloque el interruptor de encendido/apagado situado en el lateral de la unidad de control en la posición 0 (apagado). Espere durante aproximadamente 10 segundos y reinicie la unidad de control.

Ahora la unidad de control se pondrá en marcha. Consulte la sección 4.1.

5. Reutilización, limpieza y reacondicionamiento

El producto es reutilizable. Cuando lo vaya a reutilizar, es importante seguir las instrucciones de limpieza y reacondicionamiento que se indican a continuación.

Antes de utilizar de nuevo el producto con un nuevo usuario, se recomienda limpiar el colchón de conformidad con las siguientes instrucciones. En caso de duda, consulte a su asesor sobre higiene de Care of Sweden para recibir asistencia e instrucciones.

Por lo demás, la limpieza y el reacondicionamiento se deberían realizar según sea preciso.

5.1 Limpieza

UNIDAD DE CONTROL



Limpie la unidad de control con un paño humedecido y una solución de limpieza suave destinada a ello, como alcohol con o sin surfactantes tensoactivos, soluciones oxidantes, cloro al 1 % como máximo o peróxido de hidrógeno al 1,5 % como máximo.

Si fuera necesario utilizar otras sustancias, seleccione un producto que no afecte a la unidad de control.

CUBIERTA DEL COLCHÓN



Las cubiertas pueden limpiarse con una solución de limpieza suave destinada a ello, como alcohol con o sin surfactantes tensoactivos, isopropanol al 70 %, soluciones oxidantes, cloro al 1 % como máximo (al 10 % como máximo para la cubierta Stone) o peróxido de hidrógeno al 1,5 % como máximo.

Se deberá limpiar con agua fría de forma inmediata cualquier mancha provocada por excrementos o sangre. Siga cuidadosamente las instrucciones locales así como las referidas al detergente.



Se deberían separar las distintas capas de las cubiertas antes de limpiarlas. Las piezas se deben lavar con colores similares.



Para la limpieza, deberá evitarse el empleo de productos basados en cloruros y fenólicos, puesto que pueden deteriorar la superficie de PU de la cubierta. Si a pesar de ello se usan cloruros, recomendamos diluirlos con un máximo de concentración no superior al 1 % (no superior al 10 % para la cubierta Stone).

CUBIERTA INTERIOR



Limpie la zona afectada con una solución de limpieza suave destinada a ello, como alcohol con o sin surfactantes tensoactivos, isopropanol al 70 %, soluciones oxidantes, cloro al 1 % como máximo o peróxido de hidrógeno al 1,5 % como máximo.

5.2 Reacondicionamiento

UNIDAD DE CONTROL

Vea las instrucciones en el capítulo 5.1.

COLCHÓN

1. Desconecte el conector del tubo de la unidad de control y extraiga el aire del colchón.
2. Quite las cubiertas. Para obtener más información sobre la limpieza de las cubiertas, consulte la sección 5.1.
3. Traslade el colchón a un lugar limpio y apropiado para la limpieza.
4. Limpie las celdas, todos los tubos y el módulo CPR con una solución de limpieza suave destinada a ello, como alcohol con o sin surfactantes tensoactivos, isopropanol al 70 %, soluciones oxidantes, cloro al 1 % como máximo o peróxido de hidrógeno al 1,5 % como máximo. Deje secar.
5. Limpie las superficies de trabajo con un detergente y/o un desinfectante adecuados.
6. Junte todas las celdas del colchón. Si, por cualquier motivo, se han soltado las cámaras de los tubos, se deberán sustituir tal y como se ilustra en la sección 2.1.

.....

NOTA:

- Compruebe la cubierta higiénica, las celdas y las mangueras cada vez que se limpie el producto. Si alguna estuviera dañada, deberá cambiarse o repararse. Compruebe también la unidad de control, los conectores de los tubos y el cable eléctrico al proceder a la limpieza. Las piezas dañadas deben repararse o cambiarse. Las celdas de aire se pueden separar usando un conector de desenganche rápido, facilitando así la limpieza de las celdas.

.....

6. Almacenamiento

Se recomienda guardar el colchón y la unidad de control en la bolsa del producto (accesorio). Maneje el producto empaquetado con cuidado. No ponga objetos pesados en la parte superior. Para obtener información adicional sobre la temperatura de almacenamiento, consulte la sección 9.

Si la unidad de control tiene una batería de seguridad (variante), se debe cargar cada seis meses en caso de que no se utilice la unidad de control.

La unidad de control debe almacenarse en un ambiente seco cubierto y alejada de la luz directa del sol.

7. Mantenimiento

7.1 Generalidades

Cada vez que utilice el producto, realice las siguientes comprobaciones:

1. El cable eléctrico y el adaptador de alimentación no presentan ningún daño.
2. Los tubos de conexión (marcados como «CPR») situados en el lateral de la unidad de control están colocados correctamente y no presentan ninguna fuga.
3. La cubierta higiénica está intacta y la cubierta y las celdas están correctamente montadas.
4. Ningún tubo ni conector está dañado u obstruido. Si necesita algún repuesto, rogamos que se ponga en contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local.

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, asegúrese de que la unidad de control esté apagada. El mantenimiento no se realizará mientras se utiliza el producto.

7.2 Cambio del filtro de aire

Cambie el filtro de aire una vez al año:

1. Afloje la pequeña placa protectora de la parte trasera de la unidad de control con un destornillador Torx de tamaño T10.



2. Retire el filtro del soporte.

3. Coloque el filtro nuevo en el soporte con el lado rosa hacia afuera. Vuelva a colocar la placa protectora en su lugar y fíjela con los tornillos.

Si la unidad de control se utiliza en un entorno muy sucio, será necesario inspeccionar el filtro dos veces al año o más.

7.3 Batería de seguridad

Para garantizar una función y estado óptimos, la batería de seguridad nunca se debería descargar por completo. La batería se carga cuando la unidad de control está operando. Si se deja la unidad de control sin funcionar durante mucho tiempo, la batería de seguridad se debería cargar cada seis meses con fines de mantenimiento. Para ello, conecte el adaptador de alimentación a la toma de la pared y a la unidad de control.



8. Resolución de problemas

Problema	Solución
La unidad de control no arranca	<p>Compruebe que se ha conectado el adaptador de alimentación al suministro de red.</p> <p>Compruebe que el LED del adaptador de alimentación esté de color verde.</p>
La unidad de control emite un ruido y parpadea, pero la pantalla está apagada	<p>Compruebe que el adaptador de alimentación no se haya aflojado (tanto en el suministro de red como en la unidad de control).</p> <p>Compruebe que el interruptor esté en la posición 1 (encendido).</p> <p>Si la unidad de control está caliente, se puede haber activado la protección frente a sobrecalentamiento. Si es así, espere un poco e inténtelo de nuevo.</p> <p>Si el problema persiste, póngase en contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local.</p>
El usuario está «tocando fondo»	<p>Reinicie la unidad de control. Consulte la sección 4.9. La unidad de control empezará a hacer un pesaje. Espere a que el símbolo del pesaje se apague y a que la unidad de control vuelva a estar en silencio.</p> <p>Realice un control con la mano adicional (vea la sección 4.4). Si el hueco es demasiado pequeño, suba la selección de confort por fases.</p> <p>Si el problema persiste, póngase en contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local.</p>
El colchón se mueve	<p>Compruebe que el colchón de aire está sujeto al somier con las correas de debajo (dos en la cabecera y dos a cada lateral).</p>
Algunas celdas tienen menos aire	<p>Esto es normal si se ha seleccionado el programa alterno, ya que el suministro de aire pasa entre las celdas alternas durante un período de ciclo predeterminado (un ciclo = 10-25 minutos).</p>
La unidad de control emite un ruido; se notan vibraciones	<p>Compruebe cómo está suspendida en la cama. Puede haber resonancia, se sienten vibraciones en algunas partes de la cama. Quite la unidad de control y escuche para ver si ha cambiado algo. Se puede resolver poniendo la unidad de control sobre una superficie firme y plana o colocando una toalla entre la unidad de control y la cama.</p> <p>Si el problema persiste, póngase en contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local.</p>

Si la información proporcionada anteriormente no respondiera a sus preguntas, rogamos que se ponga en contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local.

9. Descripción técnica

9.1 Especificaciones técnicas

Unidad de control		ESPECIFICACIÓN
Modelo		CuroCell UNO®
Tensión de entrada		100-240 V / 50-60 Hz
Consumo de energía		1,5 A
Fusibles		Sin fusible
Modo de funcionamiento		Presión baja constante, de pulsos y alterno
Ciclo de trabajo	(de pulsos y alterno)	10 min, 15 min, 20 min, 25 min
Alimentación	Toma CA sin conexión a tierra, clase II de seguridad eléctrica	Utilice solo un suministro eléctrico con la pieza número RR9KE5000LRPYIMG2806
	Toma CA con conexión a tierra, clase I de seguridad eléctrica	Utilice solo un suministro eléctrico con la pieza número RR9LE5000LRPYIMG2768
Medidas (L x An x Al)		15,6 cm x 38,7 cm x 25,1 cm
Peso		5,2 kg (equipado del todo)
Nivel de ruido, unidad de control, máx.:		EN ISO 11201:2010 - 20 dBA (en la posición del operario), 18 dBA (en la cabecera). ISO 3746:2010 - 40 dBA.
Ambiental	Temperatura	Utilización: +5 – 40 °C Almacenamiento: - 25 °C – 70 °C
	Modelo con batería de seguridad	Almacenamiento: - 20 °C – 45 °C Transporte: - 25 °C – 70 °C
	Humedad	Utilización: 15 % – 93 % sin condensación Almacenamiento: < 93 % sin condensación
	Atmosférica	700 hPa – 1060 hPa
Batería de seguridad (opcional)		10 x Ni-MH, 1,2 V, 3500 mAh
Clasificación eléctrica		Clase I, Clase II, Tipo BF
Clasificación IP		IP42
Grado de seguridad en presencia de anestésicos inflamables:		El dispositivo no está diseñado para su uso con gases anestésicos inflamables
Pieza aplicada		Colchón
ESPECIFICACIONES		
Modelo		CuroCell UNO®
Medidas (An x L x Al)		80/85/90/105/120 x 200/210/220 x 20 cm
Peso		11 kg (80x200 cm)

NOTA: Care of Sweden se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto en cualquier momento.

ADVERTENCIA

- Siga cuidadosamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento para evitar lesiones corporales, así como daños en el producto u otro equipo.

9.2 Normas


Este sistema se ha probado y está autorizado de conformidad con las siguientes normas:

IEC 60601-1 EN ISO 10993 EN 597-1 EN ISO 14971
 IEC 60601-1-2 EN 12182 EN 597-2
 IEC 60601-1-11

9.3 Marcado

LA UNIDAD DE CONTROL


La unidad de control está marcada como se muestra a continuación (ejemplo).

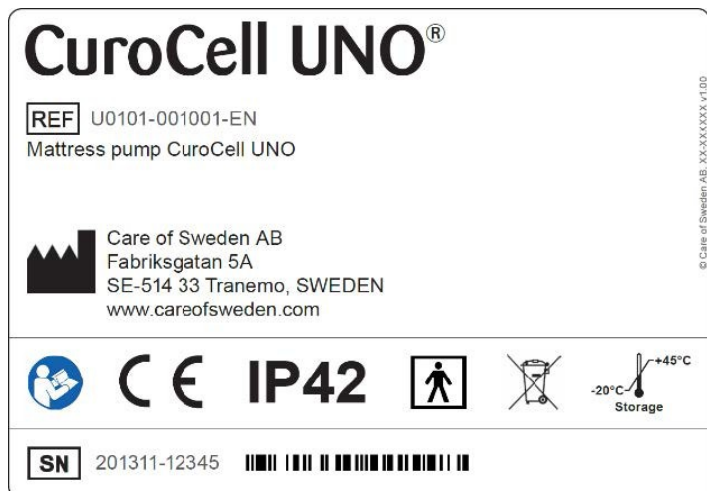

Si desea consultar una explicación, vea la sección 9.4 sobre la explicación de los símbolos.

ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN

El adaptador de potencia forma parte de la unidad de control y está marcado como se muestra a continuación (ejemplo).

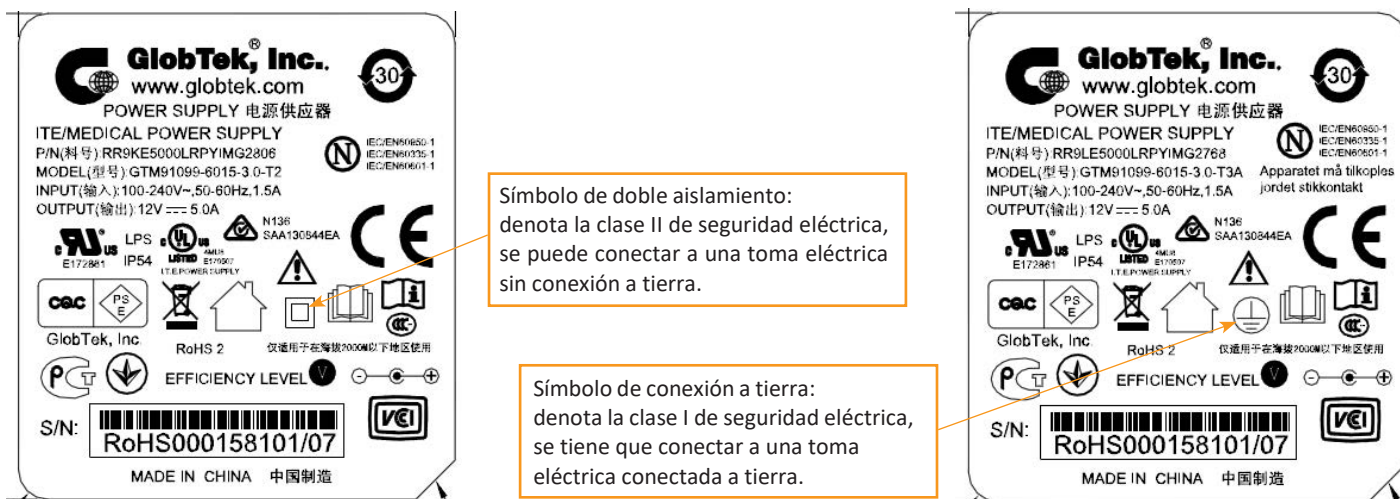


ADVERTENCIA

- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, el equipo marcado como clase I de seguridad eléctrica se tiene que conectar solo a una toma eléctrica conectada a tierra.

Si desea consultar una explicación, vea la sección 9.4 sobre la explicación de los símbolos.

EL COLCHÓN

El colchón, la cubierta y la cubierta interior están marcados tal y como se indica a continuación (ejemplo).

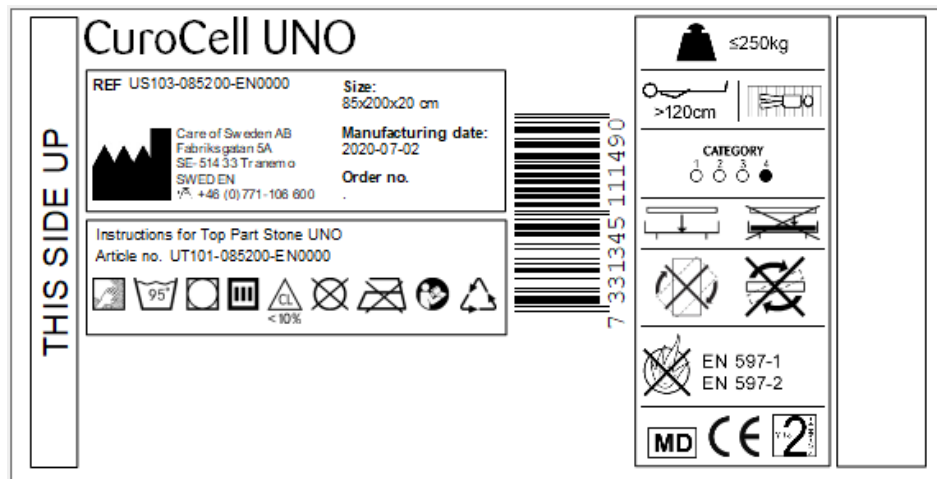

Si desea consultar una explicación, vea la sección 9.4 sobre la explicación de los símbolos.

9.4 Explicación de los símbolos



Número de artículo



Fabricante

XXXX-XX-XX

Año-Mes-Día



Colocación de los pies



Lea las instrucciones de uso



Grupo de funciones



Marcado CE de conformidad con el Medical Device Regulation (UE) 2017/745



Reciclaje



No desechar con los residuos domésticos; seguir las instrucciones de reciclaje



Peso del usuario recomendado



Información del usuario - categoría



Se coloca directamente sobre el somier



Compensa los roces




Protector de talones




Función Pack&Go™



No lavar a máquina

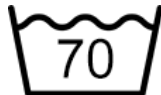

Lavar a máquina a 70 °C

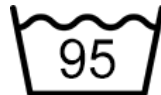

Lavar a máquina a 95 °C



Cloro



Secar en secadora



No secar en secadora



Dejar escurrir hasta que se seque



No planchar



No limpiar en seco



Limpiar con un paño



Equipo de la clase II (Aislamiento doble). Indicado en el adaptador de alimentación.



Tipo BF



Clase de IP (Clase de protección)



Rango de temperatura



Número de serie



Equipo de la clase I (conectado a tierra). Indicado en el adaptador de alimentación.



El colchón se debe usar con el usuario tumbado sobre él longitudinalmente



Distribuido por



Dispositivo médico



UDI

10. Repuestos

CuroCell UNO®

Colchón completo

N.º de artículo	Descripción
US103-YYYYYY-XX0000	Colchón completo con cubierta Stone/CC, clase II
US101-YYYYYY-XX0000	Colchón completo con cubierta Stone/CC, con batería de respaldo, clase II

Cubierta, parte superior Stone, UNO

N.º de art.	Medidas
UT101-080200-XX0000	80x200 cm
UT101-080210-XX0000	80x210 cm
UT101-080220-XX0000	80x220 cm
UT101-085200-XX0000	85x200 cm
UT101-085210-XX0000	85x210 cm
UT101-085220-XX0000	85x220 cm
UT101-090200-XX0000	90x200 cm
UT101-090210-XX0000	90x210 cm
UT101-090220-XX0000	90x220 cm
UT101-105200-XX0000	105x200 cm
UT101-105210-XX0000	105x210 cm
UT101-105220-XX0000	105x220 cm
UT101-120200-XX0000	120x200 cm
UT101-120210-XX0000	120x210 cm
UT101-120220-XX0000	120x220 cm

Cubierta, parte inferior CuroCell, UNO

N.º de art.	Medidas
UB101-080200-XX0000	80x200 cm
UB101-080210-XX0000	80x210 cm
UB101-080220-XX0000	80x220 cm
UB101-085200-XX0000	85x200 cm
UB101-085210-XX0000	85x210 cm
UB101-085220-XX0000	85x220 cm
UB101-090200-XX0000	90x200 cm
UB101-090210-XX0000	90x210 cm
UB101-090220-XX0000	90x220 cm
UB101-105200-XX0000	105x200 cm
UB101-105210-XX0000	105x210 cm
UB101-105220-XX0000	105x220 cm
UB101-120200-XX0000	120x200 cm
UB101-120210-XX0000	120x210 cm
UB101-120220-XX0000	120x220 cm

Colchón

N.º de art.	Descripción	Medidas	N.º de art.	Descripción	Medidas
CC-901410-K	Celda principal, PU	80x15 cm	CC-901420-K	Celda para los talones, PU	80x13 cm
CC-901412-K	Celda principal, PU	85x15 cm	CC-901422-K	Celda para los talones, PU	85x13 cm
CC-901414-K	Celda principal, PU	90x15 cm	CC-901424-K	Celda para los talones, PU	90x13 cm
CC-901416-K	Celda principal, PU	105x15 cm	CC-901426-K	Celda para los talones, PU	105x13 cm
CC-901418-K	Celda principal, PU	120x15 cm	CC-901428-K	Celda para los talones, PU	120x13 cm

N.º de art.	Descripción	Medidas
CC-901514-K	Celda de seguridad, PU	75x60 cm (para colchones de 80 cm de ancho)
CC-901512-K	Celda de seguridad, PU	80x60 cm (para colchones de 85 cm de ancho)
CC-901510-K	Celda de seguridad, PU	85x60 cm (para colchones de 90 cm de ancho)
CC-901516-K	Celda de seguridad, PU	100x60 cm (para colchones de 105 cm de ancho)
CC-901518-K	Celda de seguridad, PU	115x60 cm (para colchones de 120 cm de ancho)
CC-901524-K	Celda de seguridad, PU	75x80 cm (para colchones de 80 cm de ancho)
CC-901522-K	Celda de seguridad, PU	80x80 cm (para colchones de 85 cm de ancho)
CC-901520-K	Celda de seguridad, PU	85x80 cm (para colchones de 90 cm de ancho)
CC-901526-K	Celda de seguridad, PU	100x80 cm (para colchones de 105 cm de ancho)
CC-901528-K	Celda de seguridad, PU	115x80 cm (para colchones de 120 cm de ancho)
CC-901544-K	Celda de seguridad, PU	75x70 cm (para colchones de 80 cm de ancho)
CC-901542-K	Celda de seguridad, PU	80x70 cm (para colchones de 85 cm de ancho)
CC-901540-K	Celda de seguridad, PU	85x70 cm (para colchones de 90 cm de ancho)
CC-901546-K	Celda de seguridad, PU	100x70 cm (para colchones de 105 cm de ancho)
CC-901548-K	Celda de seguridad, PU	115x70 cm (para colchones de 120 cm de ancho)

Juego de tubos

N.º de art.	Descripción	N.º de art.	Descripción	N.º de art.	Descripción
CC-908044	Juego de tubos 200 cm	CC-908045	Juego de tubos 210 cm	CC-908046	Juego de tubos 220 cm

Adaptador de alimentación

N.º de art.	Descripción
CC-8655-AUS	Adaptador de alimentación, II, Australia (incluida la clavija de suministro eléctrico)
CC-8655-EU	Adaptador de alimentación, II, Europa (incluida la clavija de suministro eléctrico)
CC-8655-UK	Adaptador de alimentación, II, RU (incluida la clavija de suministro eléctrico)

N.º de art.	Descripción
CC-8649-AUS	Adaptador de alimentación, I, Australia (incluida la clavija de suministro eléctrico)
CC-8649-EU	Adaptador de alimentación, I, Europa (incluida la clavija de suministro eléctrico)
CC-8649-UK	Adaptador de alimentación, I, RU (incluida la clavija de suministro eléctrico)

N.º de art.	Descripción
CC-8661	Clavija de alimentación, Europa, para CC-8655, Clase II de seguridad eléctrica
CC-8662	Clavija de alimentación, RU, para CC-8655, Clase II de seguridad eléctrica
CC-8663	Clavija de alimentación, Australia, para CC-8655, Clase II de seguridad eléctrica
CC-8665	Clavija de alimentación, Europa, para CC-8649, Clase I de seguridad eléctrica
CC-8666	Clavija de alimentación, RU, para CC-8649, Clase I de seguridad eléctrica
CC-8667	Clavija de alimentación, Australia, para CC-8649, Clase I de seguridad eléctrica



Clavija de suministro eléctrico, Europa, II



Clavija de suministro eléctrico, Europa, I

Si necesita otros repuestos, rogamos que se ponga en contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local.

11. Opciones y accesorios

11.1 Opciones

SopORTE de la sábana

Ayuda a mantener la sábana en su posición.

Pinza para sujetarla a la cubierta; seis por colchón.

11.2 Accesorios

Bolsa de transporte robusta

N.º de art.	Medidas
CC-9094	80–90 cm
CC-9095	105–120 cm

SopORTE para la sábana, cada una

N.º de art.	Medidas
CC-9075	-

11.3 Otros accesorios

Para asegurar el máximo nivel de comodidad, recomendamos el uso de accesorios de Care of Sweden, dado que nuestros productos se han diseñado para complementarse entre sí.

Si necesita algún accesorio, o más información sobre nuestros productos, póngase en contacto con Care of Sweden, con su distribuidor local o visite nuestro sitio web – www.careofsweden.com.

12. Garantía

12.1 Envergadura

Este sistema CuroCell® está protegido por una garantía de 2 años contra defectos de fabricación. La garantía no se aplica al desgaste natural debido a una negligencia o a un manejo/cuidado incorrecto.

12.2 Servicio y mantenimiento

El colchón de aire CuroCell® es un producto sanitario fabricado de conformidad con el Medical Device Regulation (UE) (2017/745) que se utiliza para ayudar a prevenir y tratar las úlceras/lesiones de decúbito. Por ello, recomendamos que la unidad de control reciba mantenimiento periódicamente y se someta a inspecciones para conservar su funcionalidad y prestaciones. Al igual que otros dispositivos técnicos, una unidad de control adecuadamente cuidada funciona mejor y dura más.

El servicio y mantenimiento deberá realizarlo siempre Care of Sweden o uno de sus técnicos autorizados. Use solamente componentes que cuenten con la aprobación de Care of Sweden. El uso de repuestos no aprobados invalida la garantía. Para más información, consulte el manual de servicio de CuroCell UNO®.

Los fallos y defectos incluidos dentro de la garantía se subsanarán sin cargo alguno.

Antes de la devolución del producto deberá enviarse una reclamación de garantía a Care of Sweden.

12.3 Vida útil recomendada del producto

La vida útil estimada de este producto es de cinco años.

13. Otra información

13.1 Desmontaje y reciclaje

A excepción de ciertas piezas de la unidad de control, puede obtenerse energía de la mayor parte de los materiales que componen los productos CuroCell® mediante su incineración en incineradoras de basuras.

NOTA Si se determina que el producto está o podría estar contaminado (por ejemplo, ha sido utilizado por usuarios con una infección de transmisión hemática confirmada), el producto se deberá tratar de acuerdo con los procedimientos del proveedor sanitario o de las autoridades locales para residuos contaminados.

Unidad de control:

Las unidades de control CuroCell® usadas no se deben desmontar, excepto en el caso de las unidades de control con batería de seguridad. En su lugar, deberá llevarse a un centro de reciclaje. El producto está clasificado como «residuo electrónico».

Si la batería de seguridad está instalada en la unidad de control, se debe desmontar esta última y se debe extraer la batería para llevarla a los puntos de reciclaje de baterías especiales, de conformidad con la normativa local.

Se recomienda que esto lo lleven a cabo técnicos de servicio autorizados o que se devuelva la bomba a Care of Sweden para su desecho.

¡ADVERTENCIA!

- Manipule las baterías con cuidado, no las someta a presión mecánica. No desmonte los paquetes de la batería y tenga cuidado en caso de que se produzcan fugas. En caso de contacto con el líquido de la batería, aclare siempre la zona con agua y acuda al médico.

Colchón:

Los colchones CuroCell® usados se deberán depositar en un centro de reciclaje. El producto está clasificado como «residuo combustible».

Care of Sweden cumple su responsabilidad como fabricante mediante su afiliación al Servicio sueco de embalaje y recogida de periódicos (FTI) y a la empresa de servicios de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos, El-Kresten. Para obtener más información, póngase en contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local.

13.2 Devoluciones y reclamación de la garantía

Póngase en contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local antes de devolver el producto. Los portes de la devolución correrán a cargo de Care of Sweden si el fallo está cubierto por la garantía del producto; de lo contrario, serán abonados por el cliente.