

# CuroCell S.A.M.<sup>®</sup> PRO



CuroCell S.A.M. PRO con funda Steel



## Máxima comodidad

- Compresor con fácil selección de presión en función del peso del usuario

Una SEMP ideal para la prevención  
y el tratamiento de úlceras  
hasta categoría 3

# CuroCell S.A.M.<sup>®</sup> PRO

El colchón de superposición CuroCell S.A.M.<sup>®</sup> PRO se puede utilizar para ayudar de manera eficaz en la prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito hasta la categoría 3, inclusive<sup>(1)</sup>. Se puede utilizar también para ayudar en el tratamiento del dolor. Si se utiliza la cubierta interior opcional, se puede incrementar el confort, además de reducir más la presión.

Este colchón neumático ofrece un alto nivel de confort, además de una redistribución eficaz de la presión<sup>(2)</sup>. Gracias a la enormemente mejorada capacidad superior de peso máximo de 250 kg, este colchón de superposición responderá a los incesantes desafíos que suponen los pacientes más pesados.

El CuroCell S.A.M.<sup>®</sup> PRO incluye una rentable bomba nueva con funciones de CPR y de Transporte. La bomba determina automáticamente cuándo hay que cambiar la presión, en lugar de funcionar de forma constante. Esto hace que la bomba funcione en silencio, sin vibraciones, que ahorre electricidad y sea duradera.

También está disponible el CuroCell S.A.M. PRO CF16, que es un sistema de colchón de repuesto equipado con un núcleo de espuma integrado, que se coloca directamente sobre el somier.

Los colchones de Care of Sweden vienen equipados con una cubierta exterior higiénica estirable por los cuatro lados que cumple con los estándares pertinentes en materia de higiene<sup>(3)</sup>, calidad y seguridad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos materiales reciclables; además, son permeables al vapor<sup>(4)</sup>, lo que reduce el riesgo de maceración en la piel.

## Especificaciones

Tipo: Colchón neumático estático

Altura: 10 cm

Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría<sup>3</sup>(incluida)

Peso de usuario recomendado: 0-250 kg

Garantía: 2 años

Limpieza de la cubierta: Limpiar con un agente limpiador y/o desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en secadora.



## Prestaciones y características

- Función CPR – desinflado rápido
- De fácil manejo y mantenimiento.
- Cinta de sujeción elástica
- Funcionamiento silencioso y bomba duradera
- Bajo consumo
- Función estática y función de firmeza máxima
- Selecciones de confort a través del selector, 0-250 kg
- Cubierta higiénica suave, elástica y permeable al vapor con costuras soldadas<sup>(4)</sup>
- Etiquetado exclusivo
- Excelentes propiedades de limpieza

## Medidas

80/85/90/105/120x200/210 cm.

En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor.

## Opcional

- Bolsa resistente para el transporte y almacenamiento
- Cubierta interior extrasuave
- Transportable

## Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) Examen de la fuerza de roce y la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2009.

(3) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración de bacterias – Humedad".

(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.



Antes de utilizar el producto, lea siempre las instrucciones de uso.

Care of Sweden y CuroCell S.A.M. son marcas comerciales de Care of Sweden AB.

© Care of Sweden AB, 2017. Todos los derechos reservados.

Última actualización: 2017-01-17.



Lea el código QR para ver el video de presentación.