

**INSTRUCCIONES PARA CUNAS PRESALIDA CN.05 Marca Orla ®**



**Fabricante:** Orla Equipamientos Clínicos, S.L.  
 C/ Torno 10 Pol. Ind. Santa Ana - Rivas Vaciamadrid  
 28529 Madrid, España (Spain)  
 Tel./Fax: (+34) 91 499 0096  
 e-mail: [orlaec@orlaec.com](mailto:orlaec@orlaec.com)

**¡¡ LEER DETENIDAMENTE!!**

*El fabricante declina toda responsabilidad derivada del uso inadecuado del producto. Este producto ha sido diseñado y fabricado siguiendo las directrices marcadas por la "Directiva Europea sobre Productos Sanitarios 93/42/CEE (Real Decreto 414/1996)", y las Normativas a las que se remite CE.*



- **Peso máximo recomendado: 15 kg**
- El cestillo de la cuna se puede colocar en posición de trendelemburg manualmente encajando el cestillo en la estructura de la cuna (ver ilustración al lado) en la versión sencilla. Durante la operación evite atrapamientos.
- En la versión a gas, el movimiento de trend-antitrendelemburg se alcanza por resorte de gas. **ASEGÚRESE** de que controla los movimientos de la cuna antes desbloquear el resorte de gas. Para ello utilice el disparador que encontrará a los pies del cestillo. **SUJETE SIEMPRE** con una mano el cestillo mientras dispara el resorte con la otra. Durante la operación evite atrapamientos. (ver ilustración al lado).
- Las cunas presalida están diseñadas para acoger recién nacidos, **CUIDE** siempre de que bebé está adecuadamente acomodado encima del colchoncito y **NUNCA** descuide su atención sobre él.
- **UTILICE** lencería adecuada para el uso con bebés.
- Se deben almacenar en lugares secos y en posición horizontal apoyada en las 4 ruedas.



**Estructura**

- Las estructuras de las cunas presalida son de acero inoxidable o acero laminado en frío con recubrimiento de resinas epoxy o cromo con cestillo de policarbonato moldeado.

**MANTENIMIENTO**

- Para evitar un envejecimiento prematuro del producto debe seguir un mantenimiento regular (cada 15 días aprox.). Limpie el Producto (cestillo, colchoncito y estructura) con un paño húmedo y agua jabonosa, asegúrese de retirar el jabón y seque completamente con un paño. Evite la abrasión del colchón y que el agua penetre por las costuras. Evite los excesos de humedad. Evite los limpiadores agresivos como disolventes, ácidos, lejía, amoníaco, etc. En el caso de manchas tratar **INMEDIATAMENTE** con agua jabonosa.
- Cualquier otro procedimiento de conservación, será responsabilidad del usuario.

**GARANTÍA**

- El fabricante garantiza la reparación del producto ante defectos de fabricación, incluyendo mano de obra y piezas, durante un periodo de **VEINTICUATRO MESES (24)** a partir de su adquisición. Esta garantía se aplica al producto y los accesorios suministrados si se manejan de acuerdo a las instrucciones de uso, presentando la factura de compra. La garantía no se aplicará si las disfunciones son debidas al uso y/o desgaste normales, si el producto hubiera sido manipulado por personal no autorizado, si se producen daños ocasionados por accidentes, caídas, golpes, exposición a ambientes degradantes, humedades, fuego, negligencia, uso y/o mantenimiento incorrectos, etc, y en general si la causa no es imputable al fabricante.

