

INSTRUCCIONES SILLONES EXTRACCIONES Serie SE.15 Orla®



Fabricante:

Orla Equipamientos Clínicos, S.L.
C/ Torno 10 - Rivas Vaciamadrid
28529 Madrid, España (Spain)
Tel./Fax: (+34) 91 499 0096
e-mail: orlaec@orlaec.com

UDI Nos.

8435671505936

8435671506537

8435671506858

8435671507008

¡¡ LEER DETENIDAMENTE!!

El fabricante declina toda responsabilidad derivada del uso inadecuado del producto.

Este producto ha sido diseñado y fabricado siguiendo las directrices marcadas por la "Directiva Europea sobre Productos Sanitarios 93/42/CEE (Real Decreto 414/1996)", y las Normativas a las que se remite CE.



- Los sillones de extracciones se fabrican de acero laminado en frío recubrimiento epoxi, tablero aglomerado de madera, gomaespuma y polipiel.

Peso máximo recomendado (distribuido uniformemente sobre toda la superficie del sillón):
175 kg



- Regulación del respaldo y reposapiernas mediante las palancas laterales que comandan los resortes neumáticos. **Mantenga manos y dedos alejados de los mecanismos** de ajuste del Producto durante el posicionamiento para evitar atrapamientos



- Se suministra con **2 apoyabrazos de extracción** regulables en altura, giro e inclinación. **Antes de usarlos, asegúrese de que están firmemente ajustados.**



- Opcionalmente el sillón se suministra con ruedas, en este caso NUNCA utilice el sillón para trasladar pacientes y asegúrese de que las ruedas están bloqueadas antes de usar el sillón.**



- Opcionalmente se suministra con apoyacabezas, vigile este accesorio para evitar atrapamientos.**

- Se deben almacenar en lugares secos y en posición horizontal apoyada en las 4 patas.

- En caso de colocar peso encima, éste debe ser distribuido uniformemente sobre toda la superficie del sillón cuidando no dañar el tapizado.

Tapizado

- El tapizado es de polipiel (standard o ignifugo clase M-2, según modelos).

Estructura

- La estructura del Producto es de acero laminado en frío con recubrimiento de resinas epoxi.

MANTENIMIENTO

- Para evitar un envejecimiento prematuro del producto debe seguir un mantenimiento regular (cada 15 días aprox.). Limpie el Producto (tapizado y estructura) con un paño húmedo y agua jabonosa, asegúrese de retirar el jabón y seque completamente con un paño. Evite la abrasión del tapizado y que el agua penetre por las costuras. Evite los excesos de humedad. Evite los limpiadores agresivos como disolventes, ácidos, lejía, amoníaco, etc. En el caso de manchas tratar **INMEDIATAMENTE** con agua jabonosa.

- Cualquier otro procedimiento de conservación, será responsabilidad del usuario.

- NOTA:** Antes de utilizar un producto de limpieza, se recomienda hacer una prueba en una zona inferior (no visible), para comprobar que su uso no daña la polipiel.

GARANTÍA

- El fabricante garantiza la reparación del producto ante defectos de fabricación, incluyendo mano de obra y piezas, durante un periodo de **VEINTICUATRO MESES (24)** a partir de su adquisición. Esta garantía se aplica al producto y los accesorios suministrados si se manejan de acuerdo a las instrucciones de uso, presentando la factura de compra. La garantía no se aplicará si las disfunciones son debidas al uso y/o desgaste normales, si el producto hubiera sido manipulado por personal no autorizado, si se producen daños ocasionados por accidentes, caídas, golpes, exposición a ambientes degradantes, humedades, fuego, negligencia, uso y/o mantenimiento incorrectos, etc, y en general si la causa no es imputable al fabricante.